




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 15902 Masážne kreslo inSPORTline Rubinetto

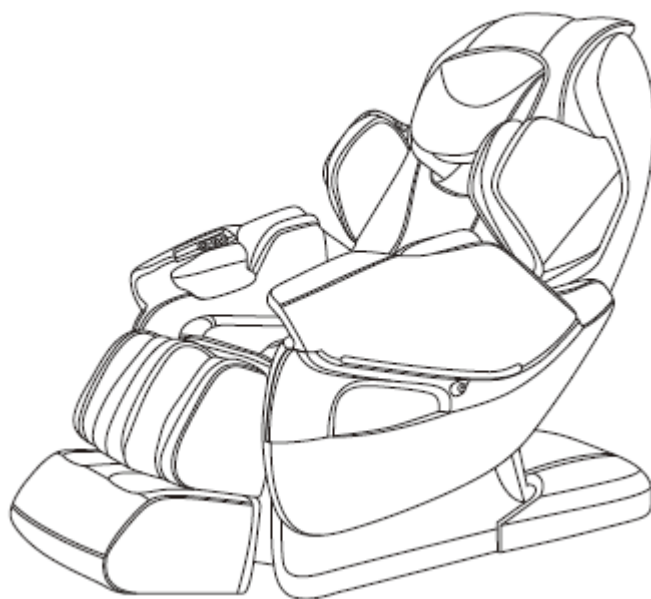

OBSAH

ÚVOD	4
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	4
ÚDRŽBA	5
PORUCHY A RIEŠENIA	5
POPIS VÝROBKU	6
FUNKCIE	7
BEŽNÉ FUNKCIE	7
MAGNETICKÁ TERAPIA	7
PREHRÁVANIE HUDBY	8
LCD RUČNÝ OVLÁDAČ	8
SPUSTENIE HLAVNÉHO NAPÁJANIA	8
ZAHÁJENIE MASÁŽE	9
APLIKÁCIA AUTO PROGRAMOV	10
MANUÁLNE OPERÁCIE PRE HORNÚ A DOLNÚ TELESNÚ MASÁŽ	11
MANUÁLNE OPERÁCIE PRE HORNÉ TELESNÉ PARTIE	11
FUNKCIE VZDUCHOVEJ MASÁŽE	12
ĎALŠIE FUNKCIE	12
NASTAVENIE MASÁŽNEHO ČASU	12
UHOL CHRBTTOVEJ A LÝTKOVEJ OPORY	12
TLAČIDLÁ RÝCHLEHO OVLÁDANIA	13
VYPNUTIE NAPÁJANIA A UKONČENIE MASÁŽE	13
VYPNUTIE NAPÁJANIA	14
SYSTÉM OVLÁDANIA MASÁŽNEHO KRESLA CEZ iPHONE ALEBO ANDROID TABLET	14
PROGRAMOVÉ ROZHRAŇÍ	14
PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM	15
ZAPNUTIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA	15
MASÁŽNE FUNKCIE A OPERAČNÝ SYSTÉM	16
ZAČÍNAME S MASÁŽOU	16
NASTAVENIE POZÍCIE RAMIEN	16
MASÁŽNE FUNKCIE PREVÁDZKY A PAUZY	17
INTENZITA MASÁŽE HORNEJ ZADNEJ ČASTI TELA	17
AUTOMATICKÉ MASÍROVANIE	17
AUTOMATICKÉ MASÁŽNE FUNKCIE A ICH SELEKTOVANIE	18
NASTAVENIE MASÁŽE	18
NASTAVENIE DRUHOV MASÁŽE, RÝCHLOSŤ, ROZPÄTIE	18
NASTAVENIE PREŤAHOVACEJ MASÁŽE	19
MASÁŽ SO VZDUCHOVOU KOMPRESIOU	20

MASÁŽ PAŽÍ VZDUCHOVOU KOMPRESIOU	20
MASÁŽ DOLNÝCH ČASTÍ TELA POMOCOU VZDUCHOVEJ KOMPRESIE (PAS, DOLNÉ PARTIE, ZADOK, NOHY)	20
INÉ MASÁŽNE FUNKCIE	21
ZÁKLADNÉ NASTAVENIE.....	22
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU	22
BEZDRÔTOVÝ BLUETOOTH PREHRÁVAČ HUDBY	24
KONIEC MASÁŽE	24
MONTÁŽ OPERADLA.....	24
MONTÁŽ VANKÚŠA A CHRBTOVÉHO VANKÚŠA.....	26
OCHRANA PODLAHOVEJ PLOCHY	26
SŤAHOVANIE MASÁŽNEHO KRESLA	27
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU.....	27
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	27
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	27

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Prečítajte si daný manuál ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Výrobok používajte a udržiujte iba podľa manuálu. Dbajte všetkých nariadení a odporúčaní. Výrobca si ponecháva právo vykonania zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Týka sa tiež farebného vyhotovenia.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Držte výrobok ďalej od detí a domácich zvierat, zvlášť, ak je zariadenie v prevádzke.
- Ak pocítite nevoľnosť, prerušte masáž a zariadenie vypnite.
- Ak kreslo nepracuje normálne, ukončite použitie, vypnite ho a vytiahnite zo zásuvky. Kontaktujte odborný servis a nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
- Nedávajte končatiny do blízkosti pohyblivých častí.
- Ak je akýkoľvek komponent alebo poťah pretrhnutý alebo poškodený, alebo ak dôjde k obnaženiu mechanických dielov, výrobok nepoužívajte a kontaktujte odborný servis.
- Ak používate prostriedky na ošetrovanie vlasov, alebo inú vlasovú kozmetiku, použite uterák k ochrane čalúnenia.
- Výrobok nie je určený osobám mladším ako 16 rokov.
- Výrobok nepoužívajte, ak sa odstránila krytina a valce sú obnažené.
- Použite iba riadne uzemnenú zástrčku podľa špecifikácie.
- Pred údržbou je nutné výrobok vypojiť z elektriny.
- Výrobok používajte iba podľa manuálu.
- Používajte iba odporúčané doplnky.
- Kreslo nepoužívajte vonku.
- Manuál si preštudujte ešte pred použitím kresla.
- Odporúčaná doba použitia vkuse je 20 minút.
- V kresle nespíte.
- Kreslo nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Výrobok nepoužívajte jednu hodinu po jedle.
- Nenastavujte masážnu intenzitu príliš vysoko, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.
- Nepoužívajte za vysokých teplôt alebo vo vlhkom prostredí.
- Ak dôjde k zmene teploty prostredia, nechajte výrobok adaptovať aspoň jednu hodinu.
- Chráňte pred prachom.
- Výrobok umiestnite na dostatočne priestrané miesto a dodržte bezpečnostný odstup od iných objektov. Zaisťte dostatočnú ventiláciu.
- Pred začatím používania kresla sa poraďte s lekárom, najmä ak trpíte týmito alebo podobnými ochoreniami: osteoporóza, srdcové komplikácie, máte kardiostimulátor, horúčku, ste tehotná alebo v perióde, máte poškodenú kožu, mentálnu poruchu, zvýšenú tepelnú citlivosť, kostné alebo chrbticové abnormality, popr. onkologické ochorenia.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste mokrý.
- Kvôli výhrevu by výrobok nemali používať osoby s nedostatočnou tepelnou vnímavosťou.
- Vždy preverte, či napätie zodpovedá špecifikácii.
- Nikdy nemanipulujte mokrými rukami s napájacím káblom.

- Chránajte pred vodou a tekutinami.
- Nepoškodzujte kabeľáž ani obvody.
- Nikdy nečistite elektronické diely, spínač alebo zástrčky vlhkou handričkou.
- Ak dôjde k prerušeniu prívodu prúdu, zachovajte dostatočnú vzdialenosť, aby náhlým spustením kresla nedošlo k poraneniu používateľa.
- Výrobok nie je určený používateľom (vrátane detí) so zníženou fyzickou alebo psychickou vnímavosťou, s mentálnym postihnutím alebo s nedostatkom skúseností. Tieto osoby musia byť pod zodpovedným dospelým dozorom.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku a používajte ho iba na určený účel.
- Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom, jeho poverencom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Ochrana elektrického zariadenia: Trieda I
- Len pre domáce použitie.
- Výrobok zodpovedá normám EN 60335-1 a EN 60335-2.
- Max. hmotnosť používateľa: 150 kg.


ÚDRŽBA

- Neodborná demontáž alebo údržba je porušením podmienok záruky.
- Výrobok sami neopravujte a nerozoberajte.
- Kreslo vypnite po každom použití.
- Ak je zásuvka uvoľnená, výrobok nezapájajte.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, zrolujte kabeľáž a uskladnite na suchom a bezprašnom mieste.
- Chránajte pred extrémnymi teplotami, ohňom, tepelnými zdrojmi a pred priamym slnkom.
- Napájací kábel nikdy nemeňte sami, ale kontaktujte výrobcu.
- Čistite iba suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín alebo alkohol.
- Mechanické diely sú špeciálne vyrobené tak, že nepožadujú náročnú údržbu.
- Chránajte pred ostrými predmetmi.
- Nikdy kreslo neľahajte cez nerovnú plochu. Vždy ho nadvihnite.
- Nepoužívajte príliš dlho vkuse.

PORUCHY A RIEŠENIA

- Bežný chod je sprevádzaný klasickým zvukom.
- Ak ovládanie nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku, či pevne drží. Preverte zapojenie výrobku.
- Ak ubehne stanovený čas prevádzky, aktivuje sa automatické vypnutie. Pokiaľ výrobok pracuje príliš dlho vkuse, vypne ho tepelná ochrana sama. Pre reštart počkajte aspoň pol hodiny.

POPIS VÝROBKU

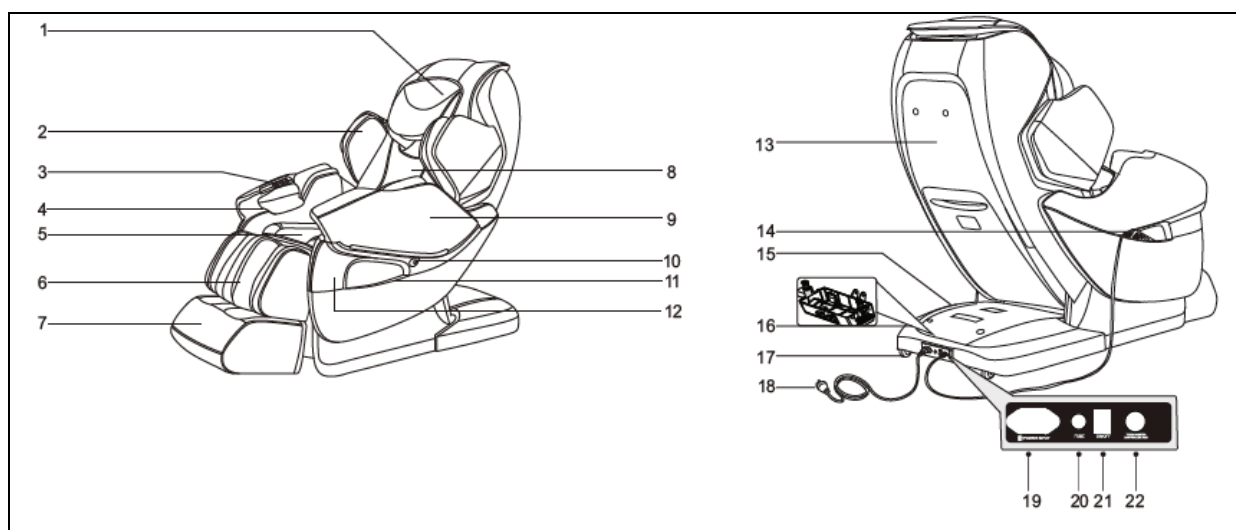

1) Vankúšik
2) Airbag na hornej opore
3) Rýchle ovládanie
4) Airbagy na opore
5) Sedací vankúšik
6) Masážna zostava pre lýtku
7) Masážna zostava chodidiel
8) Chrbtový vankúšik
9) Operadlo paží
10) Zástrčka slúchadiel
11) Vrecko na ovládač
12) Ozdoba opory
13) Zadný kryt
14) Ovládanie
15) Kryt riadiacej jednotky
16) Bezpečnostný spínač
17) Kolieska
18) Napájací kábel a zástrčka
19) Napájacia zdierka
20) Poistky
21) Spínač
22) Zdierka ovládacieho kábla

FUNKCIE

- Výrobok je opatrený zostavou tlmených 3D mechanických rúk, ktoré sa pohybujú hore a dole a tiež smerom vpred a vzad.
- Ramenná oblasť je vybavená automatickou detekciou a nastavením funkcií podľa telesných proporcií vrátane masážnych bodov. To umožní automatické nastavenie vzdialenosti masážnych rúk a plynulý masážny pohyb vzhľadom na masírované miesto a detegované telesné body. Masáž je tak založená na vedeckom podklade.
- Výrobok ponúka pohodlie, zotavenie z únavy, odpočinok, zníženie úrovne stresu, masáž bokov, celého tela, vzduchovú masáž atď.
- Má dve masážne pamäte: M1 a M2.
- Ručne vyberte masáž horných telesných partií, tri voliteľné pozície (celkovú, čiastočnú a pevnú). Šesť masážnych metód: šúchanie ramien, hnetenie, poklep shiatsu, hnetenie s poklepom a 3D. Celkom päť masážnych rýchlostí pre shiatsu a poklep. Šírka masírovanej oblasti je nastaviteľná v piatich rozsahoch.
- Vzduchová masáž paží (celkom 8 zabudovaných airbagov), masáž hornej časti ramien (4 zabudované airbagy), tlaková masáž pozadia (5 zabudovaných airbagov), vzduchová masáž lýtok (36 zabudovaných airbagov) a tri nastavenia intenzity.
- Funkcia vzduchovej masáže spodných partií: funkcia masáže chrbta (4 zabudované airbagy). Vzduchová masáž zadku (5 zabudovaných airbagov). Vzduchová masáž lýtok (36 zabudovaných airbagov) s tromi stupňami intenzity.
- Masáž horných častí paží má dva stupne nastavenia šírky. Ak nastavíte posledný stupeň, zatlačte ramenom na konektor vzdialenosti a potom ruku uvoľnite, aby mohlo zariadenie automaticky resetovať a zároveň sa nastaviť na šírku ramien.
- Výhrev chrbta - karbónové vlákna ako infračervený zdroj tepla.
- Tlačidlá rýchleho ovládania na pravej opierke pre nastavenie nôh hore a dole a pre posuv chrbtovej opory.
- Opora pre nohy sa dá roztiahnuť podľa rôznej výšky postavy.
- Vďaka posuvnej lište na zadnej opierke dosiahnete priestorovo úsporného dizajnu.
- Zdvíhanie opory lýtok, zdvíhanie chrbtovej opierky a nastavenie ľahu.
- Inteligentné ovládanie (mobil alebo tablet) skrze Bluetooth.
- Prehrávanie hudby, napojením na inteligentné zariadenie skrze Bluetooth (mobil alebo iPad) pre prehrávanie hudby. Zdieľka je na ľavej opore.
- Stiahnutie automatického masážneho programu.

BEŽNÉ FUNKCIE

MAGNETICKÁ TERAPIA

- Vložte 8 prírodných magnetov do lýtkových airbagov.
- Podľa medzinárodného priemyselného dozoru a medzinárodnej inšpekcie by mala byť povrchová intenzita 73 mT s ohľadom na národný štandard 40 – 110 mT.
- Magnetická terapia napomáha znížiť cholesterol, odstrániť voľné radikály, pozdvihnúť imunitu a zlepšiť telesné funkcie.

PREHRÁVANIE HUDBY

- Zvukové zariadenie na opore môže byť spojené so slúchadlami pre možnosť prehrávania hudby počas odpočinku.



Magnetická terapia



Zvuková zástrčka

VAROVANIE! Ak je zariadenie zapojené do napájania a na zariadení je položený ťažký predmet, potom sa chrbtová opora zablokuje voči spusteniu dole, aby nedošlo k zraneniu užívateľa.



LCD RUČNÝ OVLÁDAČ

POZNÁMKA: Iba k náhľadu.



SPUSTENIE HLAVNÉHO NAPÁJANIA



Schéma zapojenia




Poloha zdierky napájania

ZAHÁJENIE MASÁŽE

- Stlačte červený spínač pre začatie masáže a kreslo sa automaticky skloní dole.
- Stlačte určité tlačidlo auto-masáže a masážne ruky začnú automatickú detekciu ramien a prieskum Vášho tela. V rovnakej chvíli začne pracovať aj valcová opora pre lýtko (Zvoľte auto-program pre rýchlu masáž iba s detekciou ramien pre začatie okamžitej masáže a pre úsporu času). Ak neurobíte žiadnu voľbu z auto-masážnych programov do 20 minút, kreslo sa samo vypne.
- Akonáhle je dokončená detekcia Vášho tela, ozve sa zvukový signál, ktorý vydá ovládač a masážne hlavice sa začnú mierne pohybovať na Vašich ramenách, aby ukázali, kde je predpokladaná poloha Vašich ramien. Ak si v danej chvíli chcete pozíciu ramien upraviť, môžete tak urobiť stlačením tlačidiel úpravy hornej a dolnej pozície ramien podľa obrázkov nižšie. Je celkom 11 úrovní. Ak neurobíte zmenu nastavenia pozície ramien alebo nezvolíte manuálny režim v čase po skenovaní, kreslo samo začne tzv. „Fine“ masáž.

Tlačidlo	Popis	Na displeji
	Posunutie masážnych hlavíc vyššie.	
	Posunutie masážnych hlavíc nižšie.	

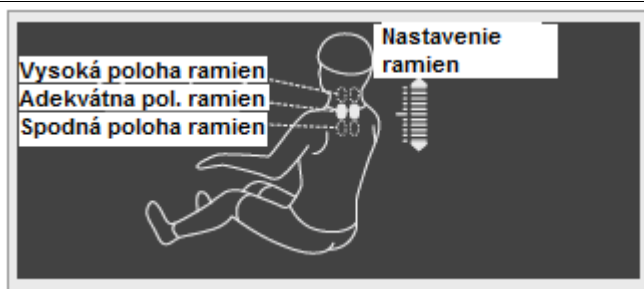


Voľba spôsobu masáže:

- Masážna pamäť: ak dochádza k detekcii pozície ramien, môžete použiť M1 alebo M2 tlačidlá pamäte pre začatie masáže. Nie je nutné čakať na zakončenie detekcie. Systém prejde do uložených programových masážnych modelov.



Charakteristika automatickej masáže:

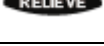Tlačidlo	Popis	Na displeji
	Všetky masážne funkcie.	F0 Auto
	Uvoľnenie svalov a kostí.	F1 Auto
	Odbúranie únavy a osvieženie.	F2 Auto
	Hĺbková masáž akupresúrnych bodov, uvoľnenie bolestivých partií.	F3 Auto

	Boky, zadok, paže, nohy a zároveň vzduchová masáž pre uvoľnenie celého tela.	F5 Auto
	Ak pracujú lýtkové airbagy a tlačia na lýtka, posunie sa chrbtová opierka dole a zároveň sa lýtková opora stlačí nadol pre napnutie oblasti bokov. Potom sa vráti do východiskovej pozície a zopakujú sa uvedené činnosti pre uvoľnenie námahy bedier a odskočí späť.	F6 Auto
	Zmiernenie únavy, uvoľnenie telesných proporcií, zlepšenie krvného obehu.	F7 Auto
	Zlepšenie krvného obehu.	F8 Auto

APLIKÁCIA AUTO PROGRAMOV

Tlačidlo	Popis	Na displeji
	APP automatická voľba funkcie: 3 auto režimy.	A1~A3
	Potvrdenie voľby: pokiaľ existujúce ALP nefunguje, stlačte potvrdzujúce tlačidlo a zvukový signál potvrdí nemožnosť použitia.	A1~A3 App Auto

MANUÁLNE OPERÁCIE PRE HORNÚ A DOLNÚ TELESNÚ MASÁŽ

MANUÁLNE OPERÁCIE PRE HORNÉ TELESNÉ PARTIE

Tlačidlo	Popis		Na displeji
 SHOULDER GRASP	Dotyk ramien: automatické prepnutie na dotyk ramien, nastaviteľná rýchlosť a intenzita.		
 KNEAD	Hnetenie: nastaviteľná rýchlosť a intenzita.		
 TAP	Poklep: rozdelené do dvoch podrežimov. Nastaviteľná rýchlosť, šírka, intenzita.		
 KNEAD&TAP	Hnetenie a poklep: nastaviteľná rýchlosť a intenzita.		
 SHIATSU	Shiatsu: rozdelené do dvoch masážnych podrežimov, nastaviteľná rýchlosť, šírka, intenzita.		
 3D	3D: rozdelené do štyroch režimov. Nastaviteľná rýchlosť a intenzita.		
 SPEED	Rýchlosť: 5 nastaviteľných stupňov.		
 WIDTH	Šírka: 5 nastaviteľných stupňov.		
 BACK STRETCH	Fixná pozícia.		
	Zadná a predná masáž na čiastkovú pozíciu.		
	Zadná a predná masáž horných partií.		
	Zadná a predná masáž horných častí chrbta.		
	Zadná a predná masáž dolných častí chrbta.		
 LOWER ADJUST	V režime fixnej alebo čiastočnej masážnej pozície sa masážne ruky môžu pohybovať smerom dole.	Masážne ruky sú dole.	Nastavenie masážnej pozície (pod fixnú a čiastkovú masážnu pozíciu je nastaviteľný masážny režim).
 UPPER ADJUST	Nad fixnú alebo čiastkovú pozíciu masážneho režimu sa masážne ruky môžu hýbať smerom hore.	Masážne ruky idú hore.	

POZNÁMKA: Pnutie chrbta H2, H3 sa zobrazuje iba v App.

FUNKCIE VZDUCHOVEJ MASÁŽE

Tlačidlo	Popis	Na displeji
 LOWER BODY	Vzduchová kompresná funkcia pre spodné telesné partie (celkom 3 režimy: spodné telesné partie, chrbát a boky, lýtko).	Feet  Back  Buttocks 
 INTENSITY	Kompresná intenzita pre spodné telesné partie, chrbát a boky, lýtko. Nastaviteľné v troch stupňoch.	Feet  Back  Buttocks 
 ARTHRISIS TRACTION	Kompresný režim spodných telesných partií alebo kompresné lýtkové režimy. Dá sa zapnúť alebo vypnúť funkcia natiahnutia lýtkovej opory.	
 ARM AIR PRESSURE	Kompresná vzduchová masáž paží (zapnutie alebo vypnutie), nastaviteľné v troch úrovniach.	Arm 

ĎALŠIE FUNKCIE

Tlačidlo	Popis	Na displeji
 Upper body intensity (weaken)	Zníženie intenzity masáže chrbta. Masážne ruky sa posúvajú a slabne sila masáže.	 Upper
 Upper body intensity (strengthen)	Zvýšenie intenzity masáže chrbta. Masážne ruky sa posúvajú a zvyšuje sa sila masáže.	 Upper
 SOLE ROLLER	Zapnutie alebo vypojenie chodidlového valca a nastavenie rýchlosti v troch stupňoch.	
 HEATER	Infračervená výhrevná terapia chrbta pre tepelný pôžitok behom troch minút.	

NASTAVENIE MASÁŽNEHO ČASU

Tlačidlo	Popis	Na displeji
 TIME	Výrobne prednastavený masážny čas je 20 minút. Max. pracovný čas je 40 minút. Stlačte časový gombík pre navýšenie v intervale o päť minút. Časové rozmedzie je možné zadať od 5 minút do 40 minút.	20 Min

UHOL CHRBTOVEJ A LÝTKOVEJ OPORY

Tlačidlo	Popis
	Automatický sklopný režim v troch úrovniach. Ak stlačíte toto tlačidlo, vstúpte do režimu.
	Zdvíhacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačením tlačidla sa opora pomaly zdvihne. Uvoľnením tlačidla sa posuv zastaví.

	Znižovacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačte toto tlačidlo a lýtková opora bude pomaly schádzať dole. Uvoľnením tlačidla posuv zastavíte.
	Zdvíhacie tlačidlo chrbtovej opierky. Stlačte toto tlačidlo a chrbtová opierka sa pomaly zdvihne. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte.
	Znižovacie tlačidlo chrbtovej opierky. Stlačte toto tlačidlo a chrbtová opierka sa pomaly zníži. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte.


TLAČIDLÁ RÝCHLEHO OVLÁDANIA

Tlačidlo	Popis
	Spustenie: Stlačte tlačidlo a zapnite alebo vypnite masážne funkcie.
	Zdvíhacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačením tlačidla dôjde k pomalému zdvíhaniu lýtkovej opory. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte.
	Znižovacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačením tlačidla sa opory pomaly znížia. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte.
	Zdvíhacie tlačidlo opory chrbta. Po jeho stlačení sa chrbtová opora pomaly zdvihne. Uvoľnením tlačidla zdvíhanie ukončíte.
	Zníženie chrbtovej opierky. Stlačte tlačidlo a chrbtová opierka sa pomaly zníži. Uvoľnením tlačidla znižovanie ukončíte.

VYPNUTIE NAPÁJANIA A UKONČENIE MASÁŽE

Stlačte spínač počas činnosti pre zastavenie všetkých masážnych funkcií alebo pre ukončenie zvoleného programu. Chrbtová a chodidlová opora sa nevráti do východiskovej pozície a na diaľkovom ovládači bude blikať „SA“ a „MEMORY (pamäť)“.

- Stlačte tlačidlo M1 alebo M2 počas 10 sekúnd pre uloženie masážneho režimu.
- Poprípade stlačte spínač počas 10 sekúnd a masážne ruky, chrbtová opierka a chodidlová opora sa vrátia do pôvodnej polohy automaticky.
- Alebo počkajte 10 sekúnd, masážne ruky sa vrátia do východiskového nastavenia, ale chrbtová opierka a chodidlová opora sa do východiskovej pozície nevrátia.

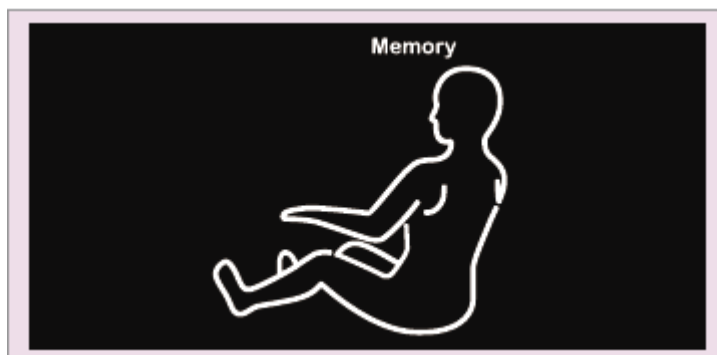

VYPNUTIE NAPÁJANIA

POZNÁMKA: Vypnite napájanie zariadenia.



Pozície napájacích zdrojov.



Spôsob vypnutia zariadenia.

SYSTÉM OVLÁDANIA MASÁŽNEHO KRESLA CEZ IPHONE ALEBO ANDROID TABLET

PROGRAMOVÉ ROZHRAVIE



Číslo	Popis
1	Funkčné tlačidlá
2	Zobrazovacia plocha masážnych údajov
3	Nastavenie intenzity pre horné telesné partie
4	Masážne tlačidlo
5	Dlhým stlačením na 2 sekundy ukončíte program
6	Minimalizácia programu
7	Stĺpcový ukazovateľ statusu
8	Servis
9	Operačné a prerušovacie tlačidlo
10	Nastavenie funkcií
11	Informačný riadok

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

1. Nahranie a inštalácia programu

Inštalácia programu, ktorý je dodaný dodávateľom alebo stiahnutý prostredníctvom internetových stránok.

Zasuňte do tabletu alebo do počítača USB flash disk. Inštalujte program do tabletu prostredníctvom softvéru (ako je Peasecod, 360 mobilný telefónny asistent). Po úspešnej inštalácii sa zobrazí programová ikona. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte dodávateľa tabletu, aby Vám pomohol pri inštalácii softvéru.

POZNÁMKA: po úspešnej inštalácii aplikácie programu, sa objaví uvedená ikona na tablete.



2. Bluetooth link

- Zapnite kreslo pomocou spínača.
- Otvorte v tablete menu, vyberte nastavenie pre užívateľské rozhranie.
- Na nastavenie funkcie Bluetooth: vyberte z ponuky Bluetooth nastavenie. Vyhľadajte ikonu „Fihonest“. Kliknite na ňu a spojte sa s Bluetooth na masážnom kresle (kód pre spárovanie je 0000). Keď sa Vám podarí spojenie s Bluetooth kliknite na „Fihonest“ znova a pripojte tablet pomocou Bluetooth s masážnym kreslom, ak je to úspešne spárované. Táto aplikácia sa používa na ovládanie masážneho kresla.

3. Problémy s párovaním Bluetooth a jeho obnovenie

- Ak sa Vám nepodarí spárovať sa s masážnym kreslom, všetko vypnite a zariadenie reštartujte. Po opätovnom naštartovaní tabletu a masážneho kresla opäť postupujte podľa návodu a pokúste sa znovu o spárovanie.
- Ak Bluetooth ukazuje úspešné spárovanie, ale nezobrazuje aplikáciu a neodpovedá na ovládanie masážneho kresla, znamená to, že špárovanie neprebehlo. Opäť všetko vypnite, resetujte a párovanie zopakujte.

ZAPNUTIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA

Uistite sa, že masážne kreslo je vypnuté. Zapnite kábel do USB zbernice na masážnom kresle a potom vsuňte do elektrickej zástrčky. Potom kreslo zapnite.



Znázornenie zapnutia do elektrického zdroja.

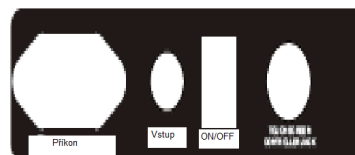


Schéma zdrojov a portov.

MASÁŽNE FUNKCIE A OPERAČNÝ SYSTÉM

ZAČÍNAME S MASÁŽOU

- Na tablete rozbaľte funkciu APP zoznam a stlačte  k začatiu kontroly programov masážneho kresla.
- Zapnite rozhranie po spustení programu. Po 5 sekundách, je stroj pripravený k masáži.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF na displeji na uvedenie masírovania do prevádzky. Masážne kreslo sa samo automaticky uvedie do polohy ležmo.



Zapojenie používateľského rozhrania.



Panel so znázorneným rozhraním a programom.

NASTAVENIE POZÍCIE RAMIEN

- Automaticky sa deteguje pozícia ramien. Počkajte do jej ukončenia.
- Ak detekcia prebehla ozve sa zvukový signál. Potom môžete nastaviť funkciu ramien s tlačidlom Up/Down (hore/dole). Možnosť nastavenia je v 11 úrovniach. Pokiaľ si nenastavíte žiadnu úroveň, masážne kreslo automaticky po 10 sekundách spustí jemnú masáž.



Pozícia ramien a detekcia rozhrania.



Pozícia ramien a nastavovanie úrovne.

Tlačidlo nastavenia pozície ramien	Funkcia
	Zvýšenie úrovne.
	Zníženie úrovne.



MASÁŽNE FUNKCIE PREVÁDZKY A PAUZY

- Keď sa masážne kreslo nachádza v prevádzkovom režime, dá sa stlačením tlačidla RUNNING/PAUSE (prevádzka/pauza) činnosť pozastaviť alebo opäť spustiť. Ak sa prístroj nachádza v režime PAUSE po dobu dlhšiu ako 10 minút, automaticky sa vypne.



V prevádzke



Pauza

PAUZA/RUNNING	Funkcia
 RUNNING	Po stlačení tohto tlačidla sa prístroj opäť uvedie do prevádzky.
 PAUSE	Po stlačení tohto tlačidla sa činnosť opäť preruší.

INTENZITA MASÁŽE HORNEJ ZADNEJ ČASTI TELA

- Táto funkcia má 5 úrovní. Pokiaľ je prístroj v režime masírovania môžete si nastaviť intenzitu masírovania hornej časti stlačením tlačidla, viď obrázok.

POZNÁMKA: možnosť nastavenia 5 úrovní.



5 NASTAVITEĽNÝCH ÚROVNÍ				
1	2	3	4	5
				

AUTOMATICKÉ MASÍROVANIE

- Stlačte  a vo výbere možností si vyberte typ masáže.
- Stlačte  a vyberte program auto masáže. V tomto programe nie je možnosť nastavenia šírky a ani rýchlosti programu.



AUTOMATICKÉ MASÁŽNE FUNKCIE A ICH SELEKTOVANIE

TLAČIDLO	FUNKCIA
	Podporuje cirkuláciu krvi.
	Napomáha k relaxovaniu a k uvoľňovaniu svalov a celého tela.
	Hlboká masáž k uvoľneniu bolesti v daných častiach tela.
	Odbúranie únavy.
	Zotavenie unavených častí tela ako sú: boky, zadok, ruky, nohy. Airbag pracuje rovnomerne. Uvoľňuje a relaxuje celé telo.
	Ak sú lýtky uvoľnené, nafukovacie airbasy pôsobia kompresiu. Vrchná časť kresla je v ležiacej polohe, lýtky sú uvoľnené a dochádza k pretiahnutiu bokov. Po návrate do pôvodnej pozície sa všetko opakuje. Sedací Airbag a masáž rukami sú v súčinnosti.
	Návrat späť do východiskovej pozície nastavenia.


NASTAVENIE MASÁŽE

- Stlačte tlačidlo  a vyberte si jednu z možností masáže, zadné pretiahovanie, rýchlosť, dĺžka funkcie, 3D, Shiatsu, stop, výšku nastavenia rúk.

NASTAVENIE DRUHOV MASÁŽE, RÝCHLOSŤ, ROZPÄTIE

- Stlačte  . Potom stlačte na zvolenú techniku masáže, a nastavte si rýchlosť, dĺžku, nastavenie silu pohybu.

POZNÁMKA: V režime uchopenie ramena nie je možný výber pretiahovania.

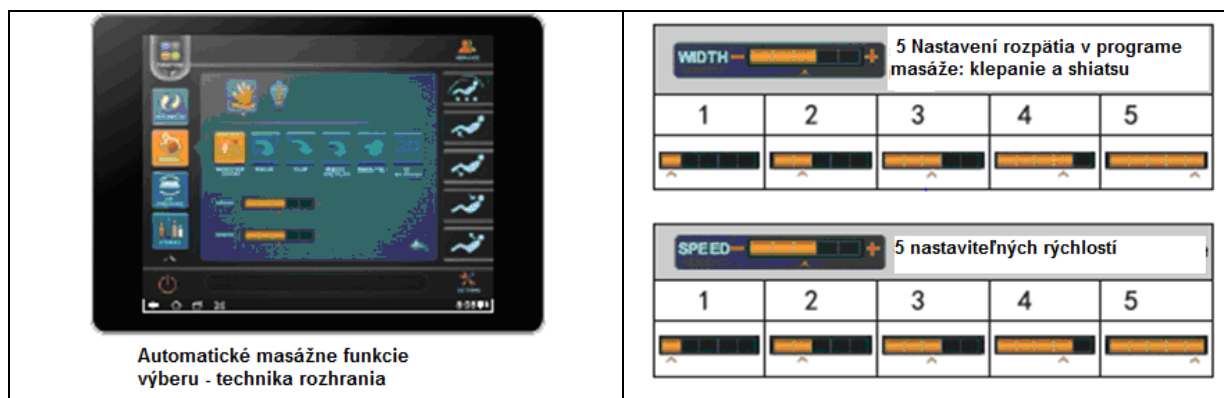

Technické tlačidlá	Funkcia
	Uchopenie ramena: automatická masáž vrátane otáčania a uchopenia ramena, nastavenie rýchlosti a intenzity.
	Hnetenie: nastavenie rýchlosti a intenzity.
	Klepanie: rozdelené na dva režimy masáže: nastaviteľná rýchlosť, šírka a intenzita.
	Klepanie a miesenie: nastavenie rýchlosti a intenzity.
	Shiatsu: rozdelené na dva masážne režimy, nastaviteľná rýchlosť, šírka, intenzita.
	3D: rozdelená do štyroch režimov masáže: nastavenie rýchlosti a intenzity.
	Návrat späť do hlavného panela.

NASTAVENIE PREŤAHOVACEJ MASÁŽE

- V informačnom paneli stlačte intenzitu masáže. Stlačte tlačidlo „Stretch“ (preťahovanie) a nastavte personálne údaje.



Nastavenie preťahovacej funkcie


Preťahovanie	Funkcia
CELÝ CHRBT	Masáž pre horné a dolné chrbtové partie.
HORNÁ ČASŤ CHRBTU	Masáž vrchnej chrbtovej časti (pojzd hore a dole).
DOLNÁ ČASŤ CHRBTU	Masáž spodnej chrbtovej časti (pojzd hore a dole).

 ČASŤ CHRBTÁ	Masáž špecifikovanej telesnej partie (pojazd hore a dole).
 ZAFIXOVANÝ BOD	Masáž fixného chrbtového bodu.

MASÁŽ SO VZDUCHOVOU KOMPRESIOU

- Na hlavnom paneli si stlačte tlačidlo  pre kompresnú masáž vzduchom. Po stlačení tohto tlačidla zvolíte časť tela, ktorú chcete namasírovať.

MASÁŽ PAŽÍ VZDUCHOVOU KOMPRESIOU

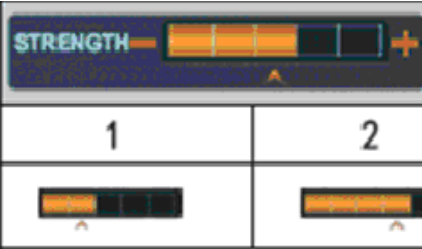 MASÁŽ PAŽÍ VZDUCHOVOU KOMPRESIOU	 3 NASTAVITELNÉ ÚROVNE 1 2 3 MASÁŽ PAŽÍ MÁ 3 NASTAVITELNÉ STUPNE INTENZITY
Funkcia vzduchovej kompresie	Popis
 Paže	Stlačte pre vzduchovú masáž partii.

MASÁŽ DOLNÝCH ČASŤÍ TEĽA POMOCOU VZDUCHOVEJ KOMPRESIE (PAS, DOLNÉ PARTIE, ZADOK, NOHY)

 DOLNÁ ČASŤ TEĽA, PÁS, ZADOK, NOHY	 3 NASTAVITELNÉ STUPNE INTENZITY 1 2 3 Spodnú časť tela môžete ovládať 3 stupňami intenzity nastavenia.
--	--

Tlačidlá pre vzduchovú kompresiu	Funkcia
	Zapnutie/vypnutie funkcie masáže kompresiou pre spodné telesné partie. Kompresia pre spodné partie vrátane pásu, zadku a nožnej časti.
	Zapnutie/vypnutie masáže pásu. Stlačený vzduch prúdi do oblasti zadku.
	Zapnutí/vypnutí funkcie vzduchovej kompresie.
	Zapnutie/vypnutie funkcie pretiahnutia nôh. Ak spustíte funkciu kompresia vzduchu pre dolnú časť tela alebo v priebehu masáže, stáva sa program masáže

nôh predvolenou funkciou.

INÉ MASÁŽNE FUNKCIE

1. Iné funkcie masáže: funkcia s využitím tepla

Stlačte tlačidlo . Potom stlačte tlačidlo , pre zapnutie alebo vypnutie nastavenia infračerveného vyhrievania.


POZNÁMKA: teplo pocítite až po 3 minútach od aktivácie funkcie.

Termálna tepelná terapia:


Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie termálnej terapie.

2. Iné funkcie – masáž chodidiel

Stlačte tlačidlo . Potom stlačte  pre masáž chodidiel. Pokiaľ je v režime nastavená funkcie pomocou valčeka, kliknite na ikonu regulácia rýchlosti valčeka, ktorá sa dá nastaviť v 3 stupňoch.

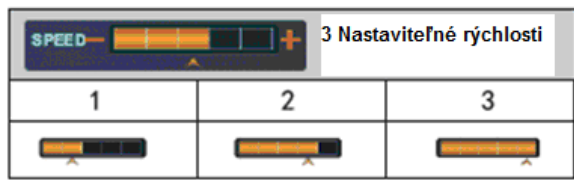	
Masáž chodidiel	
Tlačidlo	Funkcia
	Zapnite ON/OFF valček pre aktiváciu masáže chodidiel.

3. Iné funkcie – aktualizácia programu

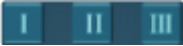Otvorte aplikáciu pomocou  a zvolte „servis“ auto-masáže pre aktualizáciu programu. Voľba automatickej  aktualizácie programu vrátane automatických režimov APP.

Potvrďte výber. Zvuková výstraha Vás upozorní v prípade neplatnej voľby alebo zlého výberu.

Aktualizácia programu:



NASTAVENÍ ZADNÉHO A LÝTKOVÉHO OPERADLA

Tlačidlo	Funkcia
Lýtková časť (pohyb hore a dole)	 Stlačením tlačidla sa lýtková opora posúva nahor. Uvoľnením tlačidla sa činnosť zastaví.
	 Stlačením tlačidla sa lýtková opora posúva nižšie. Uvoľnením tlačidla sa činnosť zastaví.
Zadné operadlo (posuv dopredu a dozadu)	 Stlačením tlačidla opora chrbta pomaly stúpa. Uvoľnením tlačidla sa činnosť zastaví.
	 Stlačením tlačidla opora chrbta pomaly klesá. Uvoľnením tlačidla sa činnosť zastaví.
Pozícia ležmo automaticky	 Celkom tri režimy automatického ležania. Jedným stlačením zmena o jeden režim.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

Voľba Jazyka

Stlačte tlačidlo  a v tejto sekcii vyhľadajte tlačidlo . Načíta sa zoznam jazykov. Môžete si zvoliť z 3 jazykov (Anglický jazyk, Čínsky jazyk zjednodušený, alebo tradičný Čínsky jazyk).

Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo  a v tejto sekcii vyhľadajte tlačidlo . Nastavte si hlasitosť pomocou VOLUME+ alebo VOLUME-.



Nastavenie jazyka



Nastavenie funkcie zvuku, zvyšovanie a znižovanie.

INŠTALÁCIA SOFTVÉRU

- Uvedte masážny prístroj do pohotovostného režimu a potvrdte fakt v tablete alebo smartfóne.
- Vyberte v aplikácii menu  a potom zvolte  v auto-masážnom programe vyberte automatickú aktualizáciu.



Tlačidlo		Popis
	Štart/Vypnutie	Štart alebo vypnutie aktualizácie stiahnutej funkcie.
	Zvolenie auto-masážneho programu podľa čísel	Auto-masážne funkcie: výber podľa čísel.
	OK	Potvrdenie aktualizácie adresy.
	Testovanie pripojenia	Testovanie pripojenia kontrolného panela s masážnym kreslom cez Bluetooth.
	Cesta	Vyberte si uloženie stiahnutej aplikácie v dokumente (zložke.)
	Aktualizácia programu	Začnite so sťahovaním aplikácie.

Napríklad: v súčasnosti potrebujete inštalovať aplikáciu auto program „irestAuto 1 zložke" v A2 režime:


- Potvrďte v ovládacom paneli alebo v tablete, mobilnom telefóne, s aplikáciou Bluetooth a tiež na masážnom kresle, ktoré je v pohotovostnom režime.
- Otvorte v aplikácii program a kliknite na servis , potvrďte auto masážny program.
- Stlačte ON/OFF v auto programe pre stiahnutie programu a vyberte zodpovedajúce číslo auto-masážneho programu (ovládač, obrazovka, displej A a Alp). Potvrďte ešte raz.
- Stlačte pre test pripojenia medzi panelom a Bluetooth na masážnom kresle. Zaznie upozornenie, ak je test úspešný a pripojenie správne. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie.
- Po úspešnom testovaní vyberte dokument a kliknite na . Zvoľte: „irestAuto1.bin“.
- Ako posledný krok kliknite na aktualizáciu softvéru v aktualizáciách aj automatického masážneho programu. Okno výzvy zobrazí hlášku „úspešné sťahovanie" (zobrazenie na diaľkovom ovládači OH), ak je aktualizácia dokončená. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie „chyba sťahovania", ktorá upozorní na zlyhanie aktualizácie.

BEZDRÔTOVÝ BLUETOOTH PREHRÁVAČ HUDBY

- Audio zariadenie s funkciou Bluetooth (napríklad mobilný telefón iPod, MED, tablet) sú kompatibilné s kreslom Bluetooth. Hudba prevedená bezdrôtovým rozhraním s Bluetooth sa dá prehrávať skrze reproduktory.
- Audio zariadenie je kompatibilné s kreslom cez Bluetooth, ako je popísané vyššie.

KONIEC MASÁŽE

- Ak masáž prebieha, stlačte tlačidlo MESSAGE ON/OFF a všetky masážne funkcie sa vypnú.

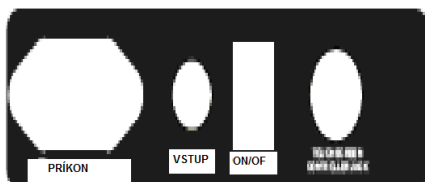

Znázornenie zdrojov a vstupov




Znázornenie zapnutia do elektrického zdroja


VAROVANIE: Napájací kábel je možné odpojiť zo zásuvky, iba ak je kreslo vypnuté.

MONTÁŽ OPERADLA


1. Identifikujte zástrčku riadiacu lakťovú opierku v spodnej strane rámu sedadla a vyberte zo štvorcového otvoru, ktorý je na pevnom oceľovom paneli (obr. 1).
2. Vyberte zástrčku zo štvorcového otvoru na oceľovej doske (obr. 2).
3. Vyberte uzáver na spodnej strane rámu sedadla a spojte ho s opierkou. Vzduchovú rúru vložte do správneho konektora (obr. 3).
4. Po dokončení spojenia konektorov ich opatrne pretiahnite štvorcovým otvorom do spodnej strany rámu sedadla. Dávajte pozor a nepriškrípnete vzduchovú trubicu (obr. 4).
5. Háčik na lakťovej opierke odpovedá zdierke na doske. Oceľová doska zodpovedá drážke penovej opory (obr. 5).
6. Pridržte lakťovú oporu rukami, zadná lakťová opierka je vyššia ako predná. Kolíček prednej opory odpovedá zásuvke na prednej časti oceľovej dosky. Skontrolujte pripojovací vodič, ak je zasunutý do spodnej časti rámu opierky a zabráňte jeho zaseknutiu. Zadná opierka operadla odpovedá zástrčke na spodnej časti oceľovej dosky. Zatláčajte zadnú časť opory, aby ste upevnili dva horné čapy opory na oceľovej doske (obr. 6).
7. Nainštalujte lakťovú vzperu do rámu kresla. Uchytenie ramien by malo ísť jednoduchým nasunutím bez použitia sily. Mierne zatlačte na rameno, aby došlo k jeho zaisteniu. Potom stlačte opierku ruky a uistite sa, že je kolík vložený do priehradky na pevnej doske z ocele. Šklbnutím rúk vyskúšajte jeho pevnosť (obr. 7).
8. Nájdite montážny otvor na zadnej časti pevného krytu, naskrutkujte skrutky šesťhranným kľúčom (obr. 8).
9. Zaistite montážny otvor na zadnej časti pevného krytu. Skrutky naskrutkujte šesťhranným kľúčom, dokončite inštaláciu. Vykonajte rovnaké kroky k inštalácii oboch operadiel rúk (obr. 9).

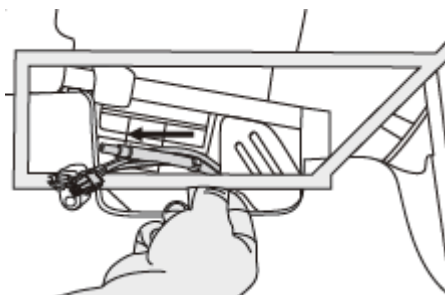

Obrázok 1

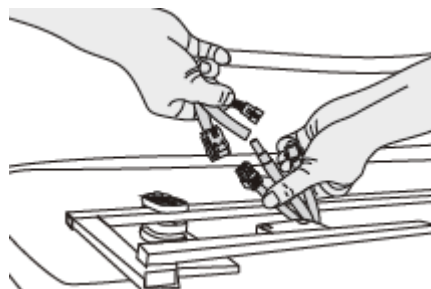


Obrázok 2

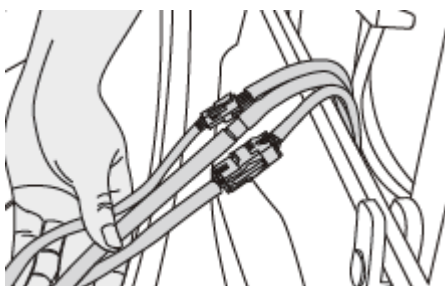


Obrázok 3



Obrázok 4 Vložte do spodnej časti rámu sedadla

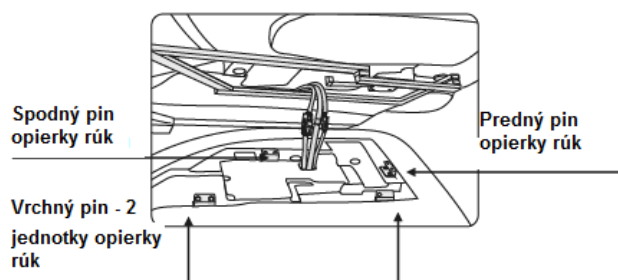


Obrázok 5

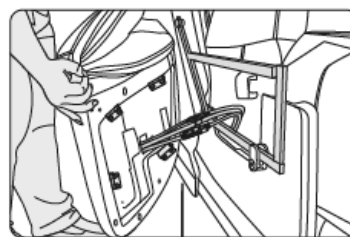


Poznámka: pripájací vodič musí byť vložený na správne miesto, aby nedošlo k zaseknutiu.

Obrázok 6

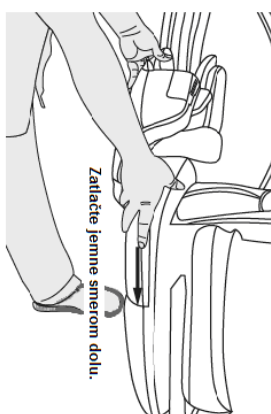

Obrázok 7

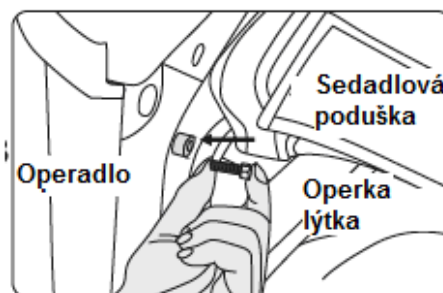

Šesťhranná skrutka v prednej časti opierky


Obrázok 8




Obrázok 9

MONTÁŽ VANKÚŠA A CHRBTOVÉHO VANKÚŠA


- Použitie vankúša na hlavu môže znížiť intenzitu hnetenia na krku a ramenách. Závisí to od zamýšľaného miesta použitia. Odporúčame ho používať. Sedák a opierka hlavy sú spojené pomocou zipsu (obr. 1). Otočte zadnú stranu vankúša hlavy a vložte jazyk vankúša dovnútra úchytu nad operadlom (obr. 2). Otočte opierku hlavy a položte zadnú stranu na operadlo. Poloha sa dá upraviť vzhľadom na odlišnú telesnú veľkosť používateľa (obr. 3).

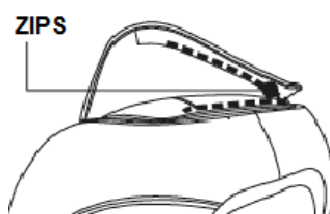

Obrázok 1

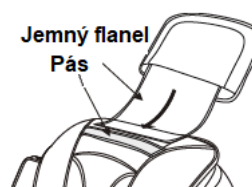


Obrázok 2

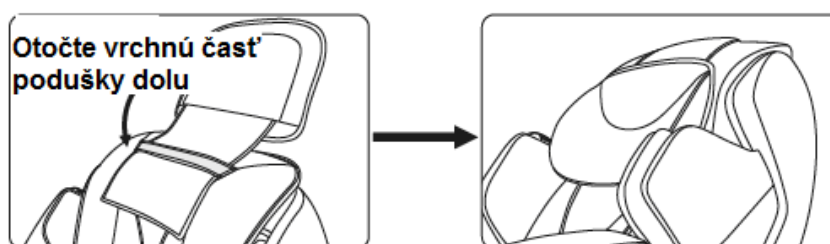

Obrázok 3

OCHRANA PODLAHOVEJ PLOCHY

Ak masážne kreslo umiestnite na drevenú podlahu, umiestnite pod kreslo koberec alebo podložku, aby ste zabránili poškodeniu podlahy.

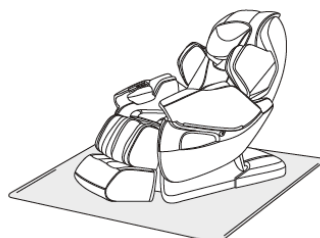

POZNÁMKA: S kreslom nejazdite po drevenej podlahe, na drsnom podklade ani ho netlačte do príliš úzkych miest. Pre premiestnenie je potreba dvoch ľudí. Uchopte prednú opierku lýtok a zadný kryt (nikdy k transportu nepoužívajte lakťovú opierku).

SŤAHOVANIE MASÁŽNEHO KRESLA

Pred manipuláciou s kreslom dajte všetku kabeľáž bokom, aby nebránila pohybu. Primárne uchopte drážku zadného krytu, zdvihnite ho v uhle (ťažisko musí byť na prednom koliesku). Kreslo môžete posunúť dopredu a potom ho vrátiť do pôvodného uhla (východisková pozícia).



VAROVANIE! Vždy vypnite vypínač a až potom odpojte napájací kábel a kábel diaľkového ovládača, než začnete s kreslom pohybovať.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Model	A86
Nastavenie	01
Napätie	110-120~60 Hz
	220-240V~50Hz/60Hz
Príkon	240 W
Maximálna doba použitia v kuse	20 min.
Hlučnosť	≤58 dB
Pohotovostné napájanie	<0.5 W
Ochrana elektrického zariadenia	Trieda I

Materiál: PVC, PA, oceľové diely a električka, elektronické diely.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: