




- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Bez ohľadu na používanie, výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za porušenie zákonov ako napríklad riadenie pod vplyvom alkoholu.
- Výsledky sú iba orientačné a neslúžia ako kritérium pre povolenie rôznych činností.
- Napájanie: 3x 1,5 V AAA alkalická batéria

Alkohol tester W-TEC Sekter

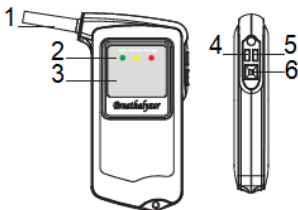

1.	Náustok
2.	Farebné ukazovatele
3.	LCD displej
4.	Ľavé tlačidlo
5.	Pravé tlačidlo
6.	Vypínač

FUNKCIE

Presný a citlivý senzor.

Veľký LCD displej s ukazovateľmi.

5 jednotiek: %BAC, ‰BAC, g/l, mg/l, mg100ml.

Hlasný alarm.

Automatické vypnutie.

SPUSTENIE / VYPNUTIE

Stlačte tlačidlo napájania na 1 sekundu



Zapnutý



Vypnutý

Výsledky sa objavia po 15 sekundách.

Pre vypnutie stlačte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.

POZNÁMKA:

- BAC = obsah alkoholu v krvi
- BrAC = obsah alkoholu v dychu

TEST

Stlačte tlačidlo vypínača po dobu 1 sekundy, ozve sa zvukový signál.

Na displeji sa zobrazí 0-0-0-0.



Načítanie



Fúkajte

Po načítaní bude blikať „bL0“ a zelené svetlo. Zhlboka sa nadýchnite a dýchajte do náustka po dobu asi 4 sekúnd.

Zobrazia sa výsledky v nastavených jednotkách:

Bude svietiť zelené svetlo a zvukový signál bude pomalý.

< 0.020% BAC

< 0.200‰ BAC (alebo 0.200 g/l)

< 0.100 mg/l (BrAC)

< 20 mg/100 ml



%BAC



‰BAC (g/l)



mg/l



mg/100ml

Bude svietiť žlté svetlo a zvukový signál bude rýchlejší.

$\geq 0.020 < 0.050\%$ BAC

$\geq 0.200 < 0.500\%$ BAC (nebo 0.500 g/l)

$\geq 0.100 < 0.250$ mg/l BrAC

$\geq 20 < 50$ mg/100 ml



%BAC



‰BAC (g/l)



mg/l



mg/100ml

Bude svietiť červené svetlo a zvukový signál bude rapídny.

$\geq 0.050\%$ BAC

$\geq 0.500\%$ BAC (nebo 0.500 g/l)

≥ 0.250 mg/l BrAC

≥ 50 mg/100 ml



%BAC



‰BAC (g/l)



mg/l



mg/100ml

Poznámka: Displej zobrazuje „bL0“ akonáhle je pripravený na detekciu, počas detekcie alkoholu displej zobrazuje odpočet 04-03-02-01, ak displej zobrazuje odpočet aj bez dýchania do náustka, znamená to, že je v prístroji zvyškový alkoholový výpar.

Opakujte testovanie, dokiaľ nie je výsledok 0 a výpary sa nevyparia.

ZMENA JEDNOTIEK

Stlačte pravé tlačidlo, zobrazí sa „100, 1000, BrAC, CN“, v ponuke surfujete pomocou ľavého tlačidla, pravým tlačidlom potvrdíte výber.

Ak nie je vykonaná žiadna zmena po dobu 20 sekúnd, tester sa vráti do nahrávacieho režimu.

100	%BAC
1000	‰BAC (g/l)
BrAC	mg/l (BrAC)
CN	mg/100 ml



%BAC



‰BAC (g/l)



mg/l



mg/100ml

Ak je nízky stav batérie, displej zobrazí „LLLL“, rozsvieti sa červené svetlo a ozve sa 5x zvukový signál.

Technické parametre:

Rozsah:	0.000 – 0.199 %BAC	
	0.000 – 1.990 ‰BAC (alebo 1,990 g/l)	
	0-000-0,995 mg/l (BrAC)	
	000 – 199 mg/100 ml	
Bod upozornenia:	0,050 %BAC	
	0,500 ‰BAC (alebo 0,500 g/l)	
	0,250 mg/l (BrAC)	
	50 mg / 100 ml	
Presnosť:	C (koncentrácia alkoholu pre bod upozornenia)	
	±0,010 %BAC	

	±0,100 ‰BAC (alebo 0, 100 g/l)	
	±0,05 mg/l	
	±10 mg	
Čas odozvy:	< 5 s	
Doba načítania:	< 30 s	
Napájanie:	3x 1,5 V AAA alkalická batéria	
Napätie:	≤120 mA	
Prevádzková teplota:	-10 °C + 50 °C	
Displej:	Displej s 3 LED ukazovateľmi	

Jednotky bežné pre štáty / kontinenty:

Mg/100 ml – Čína; g/l – Európa; ‰BAC – USA; mg/l BrAC - Japonsko