



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 29147 Elektrický štvorkolesový vozík inSPORTline
Thodor



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
MONTÁŽ	4
POPIS PRODUKTU	6
OVLÁDANIE	6
DISPLEJ	7
OVLÁDANIE A POUŽÍVANIE	7
NASTAVENIE MAXIMÁLNEJ RÝCHLOSTI 15 KM/H ALEBO 20 KM/H	10
VÝMENA OLEJA	11
SKLADOVANIE A ÚDRŽBA	11
PRED JAZDOU	11
BATÉRIA	12
PORUCHY A RIEŠENIA	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13
SERVISNÁ KNIŽKA	16

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred riadením sa oboznámte s miestnymi predpismi a zákonmi. Veková hranica a použitie sa môže líšiť od daných štátov. Je zodpovednosťou používateľa sa najprv zoznámiť so zákonmi.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Ak sa na prístroji objavia ostré hrany, okamžite ukončite prevádzku vozíka.
- Nikdy neriadte pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.
- Pred jazdou skontrolujte funkčnosť bŕzd a svetiel.
- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Akýkoľvek nový používateľ musí byť oboznámený s riadením a použitím vozíka.
- Nikdy neupravujte konštrukciu alebo motor na zvýšenie výkonu, akoukoľvek úpravou strácate nárok na záruku.
- Pred jazdou si upravte spätné zrkadlá tak aby ste videli za seba.
- Vždy sa plne venujte riadeniu. Počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón alebo slúchadlá.
- Pred jazdou skontrolujte stav batérie.
- Efektivita bŕzd sa na mokrom povrchu znižuje, vždy brzďte pomaly a s predstihom.
- Náhle brzdenie môže mať za následok stratu rovnováhy a pád.
- Pred jazdou si nastavte sedadlo do pohodlnej polohy a tak, aby ste mohli pohodlne ovládať vozík.
- Jazdite plynule, vyhnite sa náhlým zmenám rýchlosti.
- Vozík neparkujte nechránený na daždi alebo priamom slnku.
- Nezastavujte sa v prudkom kopci.
- Jazdite iba po spevnenom teréne.
- Nenabíjajte vozík bez dozoru.
- Chráňte proti dažďu a vode.
- Nikdy nenechávajte vozík naštartovaný alebo s kľúčom v zapaľovaní bez dozoru.
- Držte mimo dosahu detí, pokiaľ sa v okolí vyskytujú deti, zabráňte neoprávnenému použitiu.
- Pokiaľ chcete vozík používať na pozemných komunikáciách, o jeho používaní si naštudujte miestne predpisy a zákony.
- Osoby s obmedzenou mobilitou musia byť vždy sprevádzané ďalšou osobou.
- O zdravotnej spôsobilosti na riadenie sa poraďte s lekárom.
- Ak dôjde k náhlemu zrýchleniu alebo spomaleniu vozíka, alebo akejkoľvek inej abnormalite, okamžite zastavte jazdu.
- Vozík je určený iba pre jednu osobu súčasne.
- Za zníženej viditeľnosti majte oblečenú reflexnú vestu alebo oblečenie s reflexnými prvkami.
- Vhodné pre osoby od 18 rokov.
- **Nosnosť:** 150 kg

ŠPECIFIKÁCIE

Motor	S diferenciálom 48V 500W	Max. rýchlosť	16 km/h
Batéria	48V 20Ah olovená batéria	Rozmery	144 x 64 x 123 cm
Brzdy	Elektromagnetická brzda	Max. nosnosť	150 kg
Pneumatiky	AT13x5-6 bezdušové	Max. stúpanie	15°

MONTÁŽ

Vybalte všetky časti z balenia. Zrkadlá, nabíjací adaptér, kľúče, opierku hlavy, manuál, košík, kufor, skrutky.



Nastavenie stĺpika kormidla

Povoľte ručnú skrutku a nastavte polohu kormidla do požadovanej polohy. Potom opäť utiahnite skrutku.



Upevnenie opierky hlavy

Stlačte zámku a nasuňte opierku hlavy do opierky chrbta.



Spätné zrkadlá

Pripevnite zrkadlá a nastavte tak, aby ste videli za seba.



Košík

Upevnite košík do držiaka na kormidle.



Kufor

Upevnite kufor na zadnú stranu sedadla, do držiakov pomocou 4 skrutiek.



Vypínač

Prepnite vypínač do spustenej polohy.




POPIS PRODUKTU



1. Spätné zrkadlá	8. Opierka rúk
2. Smerovky	9. Páčka otáčania sedadla
3. Košík	10. Elektromagnetická páčka brzdy
4. Stĺpik riadenia	11. Nabíjací port
5. LED svetlo	12. Protišmykový nášľap
6. Opierka hlavy	13. Vypínač
7. Kufor	14. Nastavenie výšky sedadla

OVLÁDANIE

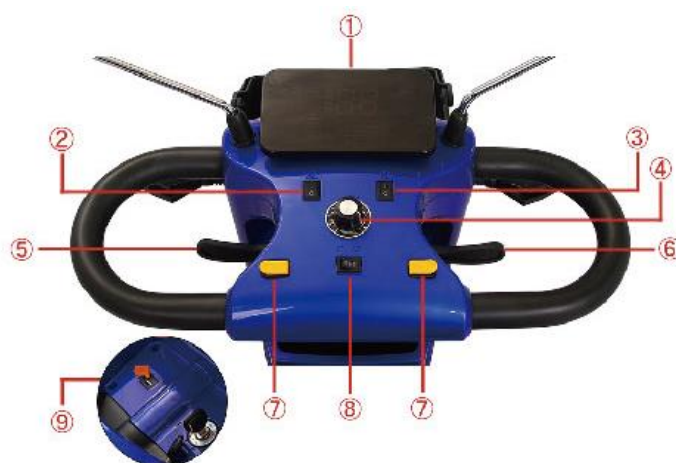

1. Displej	6. Plyn
2. Výstražné svetlá	7. Klaksón
3. LED svetlá	8. Smerovka
4. Úprava maximálnej rýchlosti	9. USB nabíjací port
5. Spiatočka	

DISPLEJ



OVLÁDANIE A POUŽÍVANIE

Na zadnej strane vozíka sú umiestnené: páčka elektromagnetickej brzdy, kolieska proti prevrhnutiu a os náhonu.


Elektromagnetická brzda

Auto mode (D):

Pred jazdou skontrolujte, že je páčka elektromagnetickej brzdy prepnutá do Auto mode. V tomto režime je možné vozík ovládať pomocou motora a bŕzd.

Manual mode (N):

Tento režim slúži iba ak je potrebné vozík tlačiť.

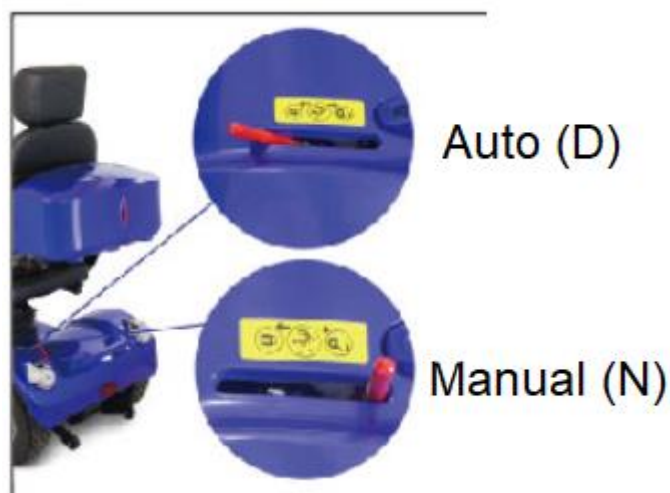

Zapaľovanie

Spustenie: Vložte kľúčik do zapaľovania a otočte doprava. LED displej sa rozsvieti.

Vypnutie: Otočte kľúčom doľava.

VAROVANIE: Ak vypnete vozík kľúčom počas jazdy, vozík automaticky zastaví.

Plyn

Pomocou plynu môžete ovládať rýchlosť jazdy dopredu a cúvania. Pred cúvaním musí vozík úplne zastaviť.

Pokiaľ pustíte plyn, vozík bude spomaľovať, kým nezastaví.

VAROVANIE: Jazda na vlhkej, klzkej alebo zľadovatenej vozovke predlžuje brzdnú dráhu. Počas jazdy z kopca majte rýchlosť vždy pod kontrolou.

Nastavenie maximálnej rýchlosti

Pomocou gombíka môžete nastaviť najnižšiu a najvyššiu rýchlosť. Min. 1.6 km/h, max. 16 km/h.

Nabíjanie

Pred prvým použitím nabite vozík. Pravidelne dobíjajte vozík, nenechávajte batériu úplne vybiť.

Nabíjací port sa nachádza pod predným sedadlom. Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu a potom do zásuvky. Počas nabíjania bude indikátor na nabíjačke svietiť načerveno, doba nabitia je cca 8 – 10 hodín. Hneď ako je batéria nabitá, bude indikátor svietiť nazeleno. Počas nabíjania môže byť nabíjačka teplá, vždy nabíjajte vozík pod neustálym dozorom mimo horľavých látok.



VAROVANIE: Chráňte nabíjačku proti fyzickému poškodeniu, pádom a nárazom. Držte mimo nízkej teploty a vlhkosti.

NASTAVITELNÉ ČASTI

Poloha kormidla

Povoľte ručnú skrutku a nastavte polohu kormidla. Potom opäť utiahnite.



Poloha sedadla

Pomocou páčky pod sedadlom nastavte polohu sedadla. Pre zaistenie pustite páčku.



Poloha opierky chrbta

Pomocou páčky môžete nastaviť uhol opierky chrbta. Pre zaistenie pustite páčku.



Nastavenie opierky paží

Uhol opierky paží môžete upraviť pomocou ručnej skrutky pod opierkami.



Otočenie sedadla

Zatiahnite za páčku dopredu pre otočenie sedadla do požadovanej polohy.



Nastavenie výšky sedadla

Povoľte ručnú skrutku a zatlačte alebo zatiahnite za sedadlo pre nastavenie požadovanej výšky. Potom zaistite pomocou skrutky.



Ovládanie klúčov



1. Zapnutie alarmu
2. Vypnutie alarmu
3. Nájst' vozík
4. 2x stlačte pre spustenie vozíka

Úložné priestory

Akýkoľvek náklad musí byť správne zaistený. Prevoz nadmerných alebo nevyvážených predmetov môže negatívne ovplyvniť ovládacie schopnosti vozidla.



NASTAVENIE MAXIMÁLNEJ RÝCHLOSTI 15 KM/H ALEBO 20 KM/H

Maximálna možná rýchlosť vozíka je závislá na legislatíve daného štátu / regiónu.

Pod kormidlom sa nachádza tlačidlo pre zmenu maximálnej rýchlosti. Ak je tlačidlo stlačené, je maximálna rýchlosť 20 km/h.


Otočným gombíkom na palubovej doske potom upravíte percentuálnu rýchlosť nastavenej maximálnej rýchlosti, príklad:

Nastavená maximálna rýchlosť - 15 km/h, otočný gombík je nastavený na 50% výkonu - maximálna rýchlosť bude 7,5 km/h.

Nastavená maximálna rýchlosť - 20 km/h, otočný gombík je nastavený na 50% výkonu - maximálna rýchlosť bude 10 km/h.



VÝMENA OLEJA

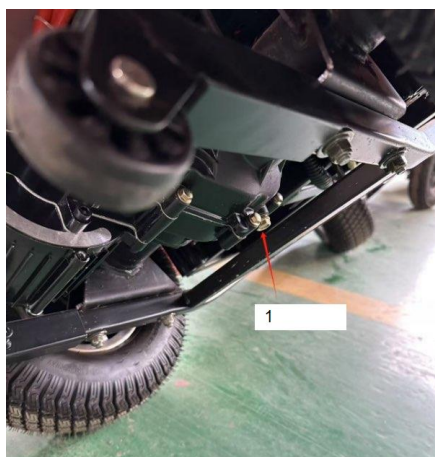

Nakloňte vozík. Výpustná skrutka (1) sa nachádza na spodnej strane. Nezabudnite pod skrutku umiestniť nádobu na zachytenie oleja.

Potom čo vypustíte olej, priskrutkujte skrutku.

Odskrutkujte zadné koleso a postavte vozík na stojan.

Odskrutkujte napúšťaciu skrutku (2), a napustite olejom (85W-90, 120-130 ml). Na napustenie použite lievik.

Skontrolujte hladinu oleja a upevnite skrutku. Pripevnite zadné koleso a skontrolujte upevnenie.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Povrchové nečistoty utrite vlhkou handričkou s malým množstvom neagresívneho čistiaceho prostriedku. Potom vozík osušte.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Pred akoukoľvek údržbou vypnite hlavný vypínač vozíka.
- Pre ochranu batérie, po každej jazde a následnom skladovaní, vypnite hlavný vypínač vozíka.
- Pokiaľ neplánujete vozík používať po dlhšiu dobu, vozík pravidelne dobíjajte (1x mesačne).
- Vozík musí byť skladovaný na suchom, tienistom a dobre ventilovanom mieste.
- Dávajte pozor, aby voda neprenikla do elektrických častí vozíka.
- Vozík nečistite prúdom vody alebo vysokotlakovými čističmi.
- Prevodový olej meňte pomocou nasledujúcej tabuľky:

Prvá výmena po najazdení 1 000 km alebo do 2 rokov od dátumu predaja.

Nasledujúca výmena po najazdení 4 000 km alebo do 2 rokov od 1. výmeny oleja.

Ďalšia výmena oleja nasleduje buď po prejdení 4 000 km alebo do 2 rokov od predchádzajúcej výmeny oleja.

Skontrolujte stav oleja, prípadne vymeňte olej, pokiaľ nie je vozík v prevádzke dlhšie ako 4 mesiace.

PRED JAZDOU

Pred jazdou skontrolujte nasledujúce:

- Funkčnosť brzd, svetiel, pohyb a vôľu kormidla a iné.
- Skontrolujte správny tlak v pneumatikách a ich stav.
- Nastavte správnu polohu sedadla.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.

BATÉRIA

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie – menovitá kapacita batérie neklesne pod 70 % svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Pre správnu funkčnosť a bezpečné použitie batérie sa riadte inštrukciami v manuáli. Ak je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápach prestaňte batériu ihneď používať.

- Počas nabíjania musí byť batéria (alebo nabíjaný produkt) vždy pod neustálym dohľadom. Batériu nabíjajte mimo dosahu horľavín alebo horľavých predmetov. Po nabití batérie vypojte nabíjačku z elektrického prúdu a potom z batérie.
- Životnosť batérie je limitovaná. Pokiaľ používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd vozíka.
- Batériu neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Do batérie nekladajte cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa batérie kovovými predmetmi. Batéria môže explodovať alebo byť poškodená.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Počas jazdy dodržiujte miestne nariadenia a zákony.
- Batériu môžete priebežne dobíjať.
- Ideálna teplota na nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Pokiaľ batériu používate dlhšiu dobu, bude jej teplota vyššia. Toto je bežný stav batérie.
- Pokiaľ používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.

PORUCHY A RIEŠENIA

Porucha	Príčina	Riešenie
Vozík nejde.	Zapaľovanie vo vypnutej polohe.	Prepnite kľúčik do spustenej polohy.
	Vybitá batéria.	Nabite batériu.
	Vypínač je vypnutý.	Prepnite vypínač do spustenej polohy.
	Elektromagnetická brzda nie je spustená.	Prepnite brzdú do „D“ polohy.
	Poškodený motor.	Skontrolujte pripojenie, nahraďte motor.
	Poškodená riadiaca jednotka.	Skontrolujte pripojenie, nahraďte riadiacu jednotku.
Dojazd na jedno nabitie je krátky.	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Zlé jazdné podmienky.	Pokiaľ je to možné, zvolte lepšie riadiace podmienky.
Batéria sa nenabíja.	Zlá zásuvka.	Skontrolujte, použite inú zásuvku.
	Povolené spoje.	Skontrolujte spoje.
	Poškodená nabíjačka.	Vymeňte nabíjačku.

Informácie vyššie slúžia iba ako základné riešenie. Nikdy vozík neopravujte sami a kontaktujte servisné oddelenie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru



SERVISNÁ KNIŽKA

Dátum servisu	Úkony	Pečiatka a podpis
	Výmena prevodového oleja ☐ Kontrola mechanických častí ☐ Ostatné:	
	Výmena prevodového oleja ☐ Kontrola mechanických častí ☐ Ostatné:	
	Výmena prevodového oleja ☐ Kontrola mechanických častí ☐ Ostatné:	
	Výmena prevodového oleja ☐ Kontrola mechanických častí ☐ Ostatné:	