



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 31981 Elektrický štvorkolesový vozík inSPORTline Clis
(S3)



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
POPIS PRODUKTU	4
FUNKCIE A POUŽÍVANIE	6
VYBRATIE A UMIESTNENIE BATÉRIE	8
POUŽÍVANIE VOZÍKA	9
INDIKÁTORY PALUBOVEJ DOSKY	14
ČISTENIE A ÚDRŽBA	16
PRED JAZDOU	16
BATÉRIA	16
NABÍJANIE BATÉRIE	16
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA	18
ŠPECIFIKÁCIE	19
FAQ	20
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA	21

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred riadením sa oboznámte s miestnymi predpismi a zákonmi. Veková hranica a používanie sa môže líšiť od daných štátov. Je zodpovednosťou používateľa sa najprv zoznámiť so zákonmi. Vhodné pre osoby od 18 rokov.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Ak sa na prístroji objavia ostré hrany, okamžite ukončite prevádzku vozíka.
- Nikdy neriadte pod vplyvom alkoholu, práškov alebo drog.
- Pred jazdou skontrolujte funkčnosť brzd a svetiel.
- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Akýkoľvek nový používateľ musí byť oboznámený s riadením a použitím vozíka.
- Nikdy neupravujte konštrukciu alebo motor na zvýšenie výkonu, akoukoľvek úpravou strácate nárok na záruku.
- Pred jazdou si upravte spätné zrkadlá tak aby ste videli za seba.
- Vždy sa plne venujte riadeniu.
- Počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón alebo slúchadlá.
- Pred jazdou skontrolujte stav batérie.
- Efektívnosť brzd sa na mokrom povrchu znižuje, vždy brzďte pomaly a s predstihom.
- Náhle brzdenie môže mať za následok stratu rovnováhy a pád.
- Pred jazdou si nastavte sedadlo do pohodlnej polohy a tak, aby ste mohli pohodlne ovládať vozík.
- Jazdite plynule, vyhnite sa náhlym zmenám rýchlosti.
- Vozík neparkujte nechránený na daždi alebo priamom slnku.
- Nezastavujte sa v prudkom kopci.
- Jazdite iba po spevnenom teréne.
- Nenabíjajte vozík bez dozoru.
- Chráňte proti dažďu a vode.
- Nikdy nenechávajte vozík naštartovaný alebo s kľúčom v zapalovaní bez dozoru.
- Držte mimo dosahu detí, pokiaľ sa v okolí vyskytujú deti, zabráňte neoprávnenému použitiu.
- Pokiaľ chcete vozík používať v bežnej cestnej premávke, o jeho vhodnosti sa poraďte s miestnymi predpismi a zákonmi.
- Osoby s obmedzenou mobilitou musia byť vždy sprevádzané ďalšou osobou.
- O zdravotnej spôsobilosti na riadenie sa poraďte s lekárom.
- Ak dôjde k náhlemu zrýchleniu alebo spomaleniu vozíka, alebo akejkoľvek inej abnormalite, okamžite zastavte jazdu.
- Vozík je určený iba pre jednu osobu súčasne.
- Za zníženej viditeľnosti majte oblečenú reflexnú vestu alebo oblečenie s reflexnými prvkami.
- Na nabíjanie batérie používajte len originálnu nabíjačku.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená
- **Nosnosť vozíka: 120 kg, nosnosť košíka: 4 kg**

OBSAH BALENIA

Elektrický vozík – 1 ks

Košík – 1 ks


Kľúč k vozíku – 2 ks

Nabíjačka – 1 ks

Používateľský manuál – 1 ks

Vyhlásenie o zhode (certifikát) – 1 ks

POPIS PRODUKTU

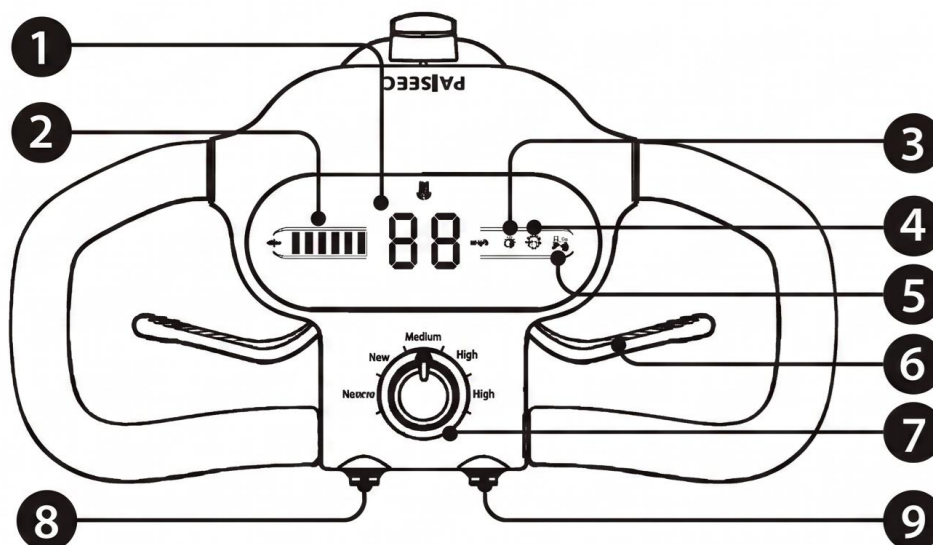

1 – Ukazovateľ rýchlosti

2 – Ukazovateľ batérie

3 – Ukazovateľ svetiel

4 – Bezpečnostná kontrolka

5 – Stav jazdy

6 – Plynová páčka

7 – Otočný prepínač režimov (Spiatočka / Nízka / Stredná / Vysoká / Režim chôdze)

8 – Spínač klaksónu


9 – Spínač svetiel



1. Kormidlo
2. Košík
3. Svetlomet
4. Predný nárazník
5. Opierka rúk
6. Sedadlo
7. Zadné koleso – 10 palcov
8. Predné koleso – 9 palcov



9. Spínacia skrinka (na kľúč)
10. Nabíjací port
11. Háčik
12. Mechanizmus skladania tyče
13. Opierka nôh
14. Elektromagnetická brzda
15. Koliesko proti prevráteniu
16. Páka na sklápanie sedadla
17. Zámka krytu batérie

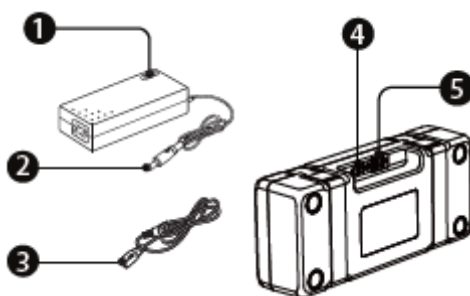


1. Indikátor nabíjačky
2. Konektor nabíjačky
3. Napájací kábel
4. Nabíjací port batérie
5. Konektor batérie

FUNKCIE A POUŽÍVANIE

Rozloženie vozíka

Zdvihnite riadiacu tyč do vzpriamenej polohy a potom zaistite skladací mechanizmus (najprv zaistite skladací mechanizmus smerom nahor, potom otočte plastovou sponou doľava, aby sa zaistila na mieste).

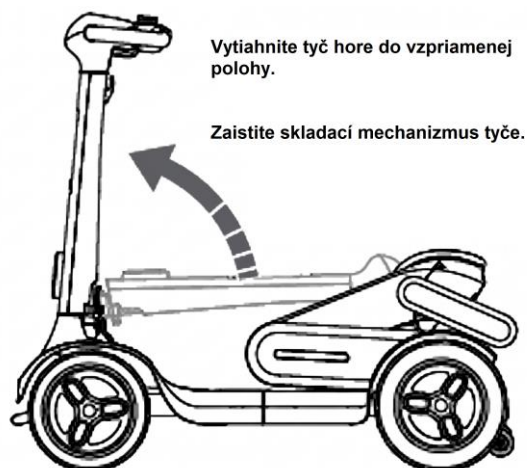

Zdvihnite sedadlo, kým nebudete počuť cvaknutie, ktoré signalizuje, že je sedadlo plne rozložené.



Upevnite košík na prednú stranu riadiacej tyče.




Zloženie vozíka


Odoberte kôš z vozíka.



Znížte sedadlo a opatrne zložte opierky dlaní.

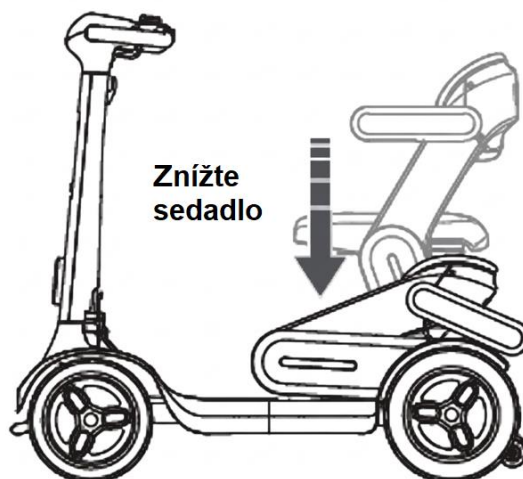


Uvoľnite skladací mechanizmus a zložte riadiacu tyč dole.

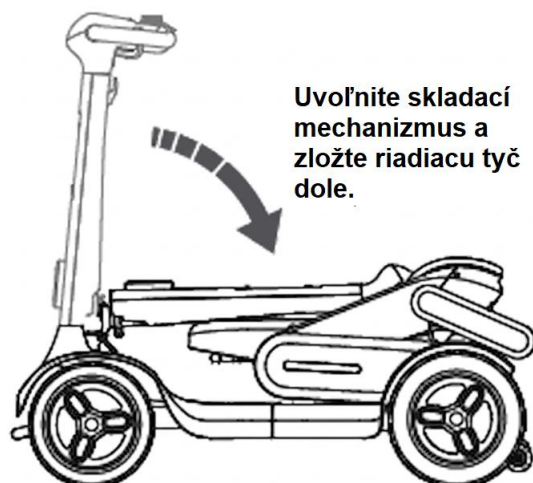

VYBRATIE A UMIESTNENIE BATÉRIE


Vybratie batérie

Vložte kľúč do kľúčovej dierky na zadnej strane opierky nôh. Otočte kľúčom do polohy „*Unlock*“ (Odomknuté). Zatiahnutím za kľúč zdvihnite kryt batérie. Zatiahnite za rukoväť priamo hore na hornej strane batérie a vyberte ju z puzdra. Uistite sa, že je batéria vyberaná zvisle, aby nedošlo k poškodeniu rýchlo spojok.

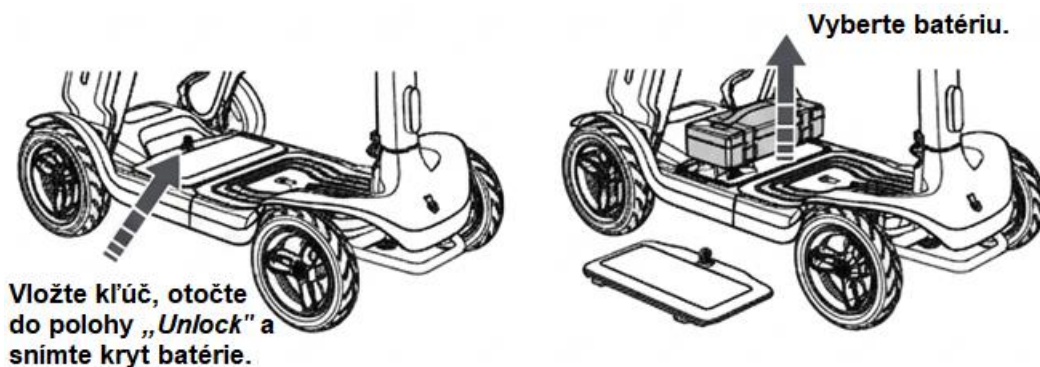

Inštalácia batérie

Zarovnajte konektory na spodnej strane batérie s konektormi v puzdre batérie. Potom batériu vložte zvisle priamo dole. Nasadte späť kryt batérie aj s kľúčom. Otočením kľúča do polohy „*Lock*“ (Zamknuté) puzdro batérie uzavrite. Uistite sa, že je kryt riadne utesnený, prípadne ho upravte do správnej polohy a potom otočením kľúča zaistíte.

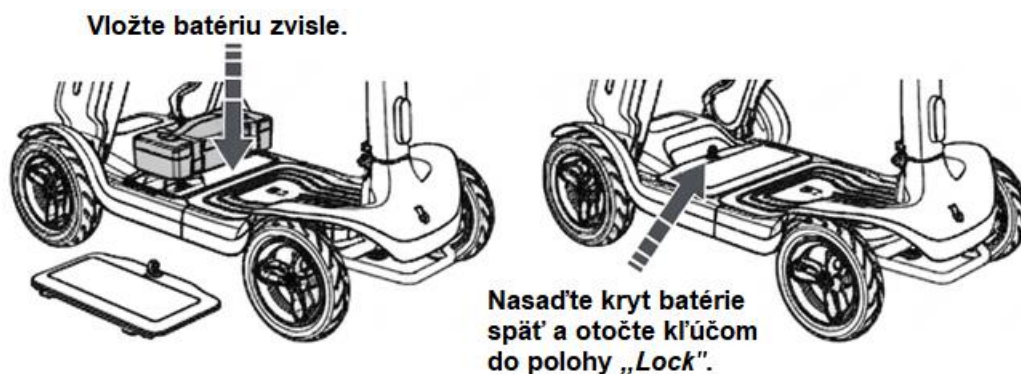

POUŽÍVANIE VOZÍKA

Štartovanie

Prehliadka pred naštartovaním

1. Vozík ako celok

- Uistite sa, že sú všetky skladacie časti vozíka správne zostavené a zaistené.
- Skontrolujte, či žiadne časti nechýbajú, nie sú poškodené alebo uvoľnené.

2. Elektromagnetická brzda

- Skontrolujte, či je možné páku brzdy stlačiť dole pre uvoľnenie elektromagnetickej brzdy (pre ručné tlačenie).
- Skontrolujte, či je možné páku brzdy zdvihnúť nahor pre aktiváciu brzdy, čo zaisťuje, že vozík nebude možné ručne tlačiť.

3. Kolesá

- Skontrolujte, či sú pneumatiky správne nahustené.
- Prezrite predné a zadné kolesá, či nie sú opotrebované; hĺbka dezénu musí byť rovná alebo väčšia ako 0,5 mm.
- Uistite sa, že v kolesách neuviazli žiadne cudzie predmety.
- Skontrolujte, či predné alebo zadné kolesá nie sú popraskané alebo deformované.
- Skontrolujte, či pri ručnom alebo motorovom pohybe nedochádza k viditeľnému kývaniu predných či zadných kolies.

4. Sedadlo

- Skontrolujte, či je sedadlo správne nastavené, či sú príslušné skrutky/čapy podrúčiek bezpečne utiahnuté a potvrdte, že je sedadlo stabilné.
- Skontrolujte, či sú čapy podrúčiek pevne dotiahnuté a či sa nepohybujú (nevykľajú).


Prehliadka po naštartovaní

1. Skontrolujte, či sa po zapnutí napájania na palubnej doske normálne zobrazuje stav batérie a ostatné indikátory.
2. Skontrolujte, či je batéria elektrického vozíka dostatočne nabitá.
 - 6 čiarok indikátora na ľavej strane palubnej dosky ukazuje úroveň nabitia batérie; čím viac čiarok svieti, tým vyšší je stav nabitia.
 - Ak červená kontrolka svieti úplne vpravo, znamená to, že zostávajúca kapacita batérie je nízka. Batériu prosím bezodkladne nabite, aby ste sa vyhli jej vybitiu počas jazdy.
3. Skontrolujte, či je možné spínač svetlometu normálne zapnúť a vypnúť.
4. Skontrolujte, či funguje tlačidlo klaksónu a či je zvuk klaksónu počuteľný.
5. Skontrolujte, či správne funguje otočný ovládač nastavenia režimov a či sú hlasové výzvy pri otáčaní ovládačom v poriadku.
6. Uistite sa, že páčka plynu nie je uvoľnená a je možné ju normálne ovládať.
7. Skontrolujte, či sa pri otáčaní kolies neozývajú žiadne nenormálne zvuky.
8. Skontrolujte, či je elektromagnetická brzda v uzavretej polohe.

Pokiaľ u vyššie uvedených častí zistíte akékoľvek abnormality, prestaňte vozík používať a bezodkladne zaistite údržbu.

Štartovanie vozíka


Vložte kľúč a otočením doprava naštartujte elektrický vozík; palubná doska sa rozsvieti.

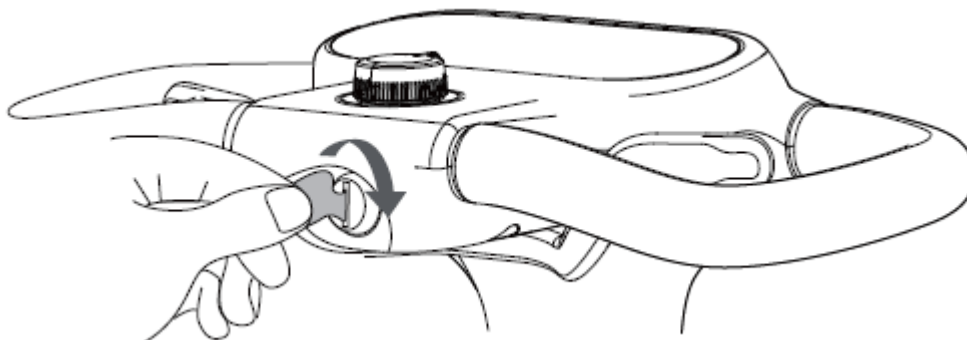


Ovládanie vozíka

Jazda vpred


1. Nastavte otočný ovládač režimov (*Mode knob*) do režimu nízkej rýchlosti „**Low**“.

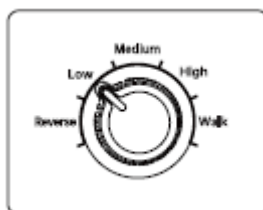

2. Pre jazdu vpred stlačte páčku plynu (buď na ľavej, alebo na pravej strane).

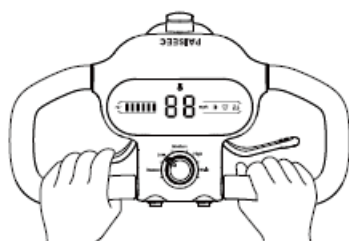

Úchop ľavou rukou.

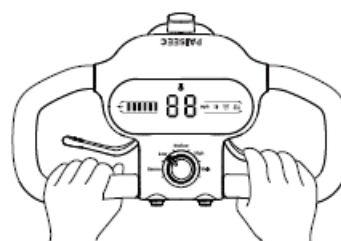


Úchop pravou rukou


3. Nastavte rýchlosť podľa potreby:
 - **Low (Nízka)**: režim nízkej rýchlosti, 2 mph (3 km/h);
 - **Medium (Stredná)**: režim strednej rýchlosti, 4 mph (6 km/h);
 - **High (Vysoká)**: režim vysokej rýchlosti, 6 mph (10 km/h).
 - Počas počiatočnej fázy učenia sa odporúča trénovať v režime nízkej rýchlosti (*Low*).

Cúvanie


1. Nastavte otočný ovládač režimov do polohy „**Reverse**“ (Spiatočka).

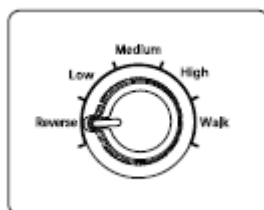

2. Pre jazdu vzad stlačte páčku plynu (buď na ľavej, alebo na pravej strane).

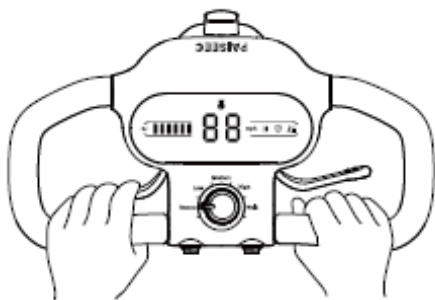

Úchop ľavou rukou

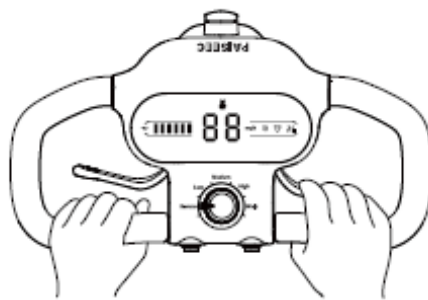


Úchop pravou rukou


3. Rýchlosť pri cúvaní: 1 mph (2 km/h).

Brzdenie

1. **Bežné brzdenie:** pre zastavenie uvoľnite páčku plynu (platí pre režim jazdy vpred aj vzad).

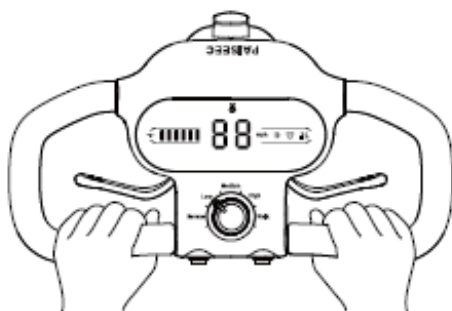


Jazda dopredu

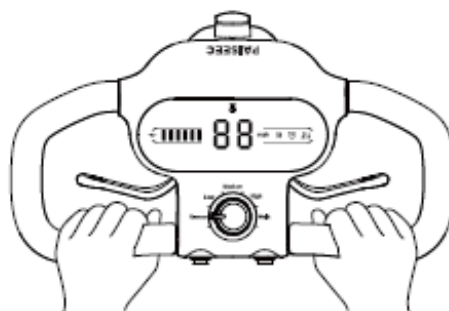

Cúvanie

2. **Núdzové brzdenie:** otočením kľúča úplne doľava aktivujete núdzové zastavenie, ktoré ďalej skráti brzdnú dráhu.

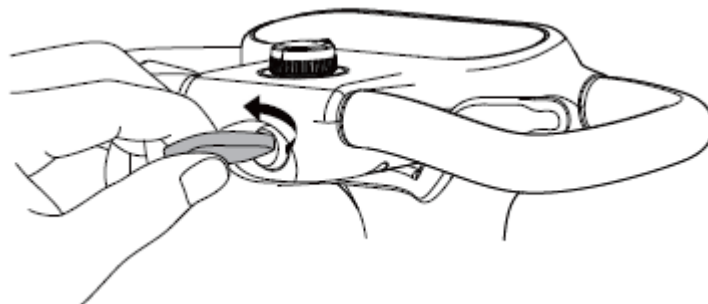


3. Poskytujeme asistenciu pri brzdení v nasledujúcich situáciách:

3.1 Prepínanie otočného ovládača režimov (rôzne typy prepínania):

- Prepnutie režimu z „**Reverse**“ (Spiatočka) na „**Low**“ (Nízka rýchlosť).
- Prepnutie režimu z „**Low**“ na „**Reverse**“.
- Prepnutie režimu z „**High**“ (Vysoká rýchlosť) na „**Walk**“ (Chôdza).
- Prepnutie režimu z „**Walk**“ na „**High**“.


Zatáčanie

1. Počas jazdy sa zatáčanie doľava alebo doprava vykonáva otočením kormidla.
2. Pri zatáčaní znížte rýchlosť a vykonávajte manévry riadenia pomaly. Starším osobám odporúčame si zatáčanie niekoľkokrát vyskúšať pred výjazdom na cestu.
3. Pokiaľ je Vaša rýchlosť pri zatáčaní príliš vysoká, rozsvieti sa bezpečnostná kontrolka a aktivuje sa inteligentné asistované spomalenie (založené na algoritme), aby sa znížilo riziko prevrátenia.
4. Vyvarujte sa prudkého otáčania kormidlom pri vysokých rýchlostiach, pretože to môže spôsobiť prevrátenie.

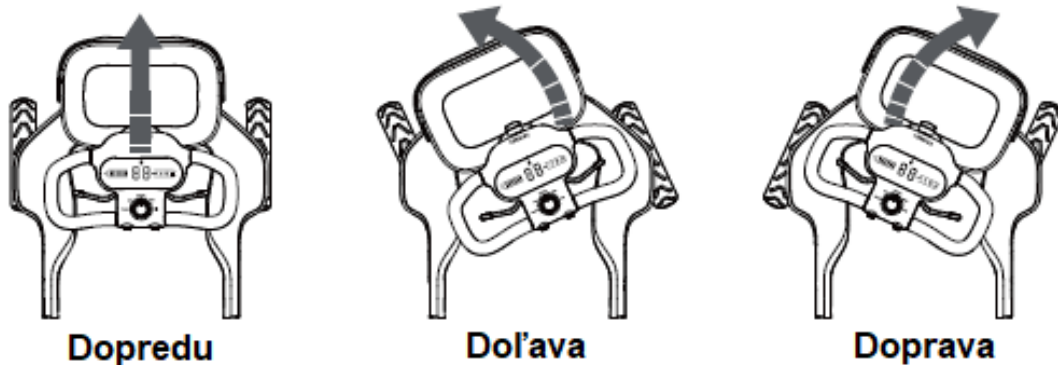

Chôdza

1. Nastavte otočný ovládač režimov do režimu „**Walk**“ (Chôdza).

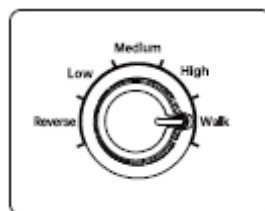


2. S vozíkom môžete ísť tak, že budete držať páčku plynu (buď na ľavej, alebo na pravej strane); počas chôdze riadte otáčaním kormidla.
3. Ak počas chôdze uvoľníte páčku plynu, začne sa brzdenie a vozík sa zastaví.

Jazdné podmienky

1. Vyhnite sa vychádzaniu na schody/stupne vyššie ako 2 palce (cca 5 cm).




2. Nepokúšajte sa schádzať alebo vychádzať svahy strmšie ako 8° .

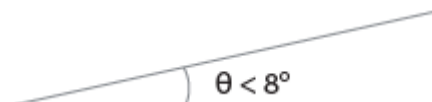

3. Nejazdite bokom (naprieč) na svahoch so sklonom väčším ako 5° .



4. Nepokúšajte sa prechádzať medzery širšie ako 4 palce (cca 10 cm).

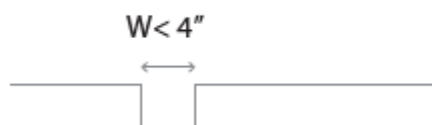


5. Nejazdite na mäkkom povrchu, ako je piesok, močiare alebo na zasnežených a zľadovatených cestách.



Uvoľnenie elektromagnetickej brzdy


V prípade poruchy počas jazdy, ktorá znemožňuje normálnu jazdu alebo tlačenie vozíka, môžete ručne uvoľniť elektromagnetickú brzdú a vozík tlačíť pred sebou.



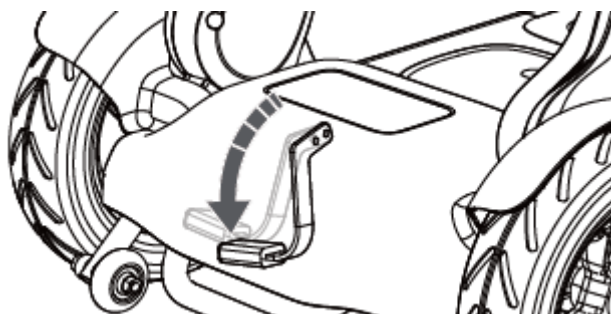



- **Spôsob uvoľnenia:** Zatiahnete za rukoväť brzdý v spodnej časti smerom dole, čím elektromagnetickú brzdú uvoľníte.

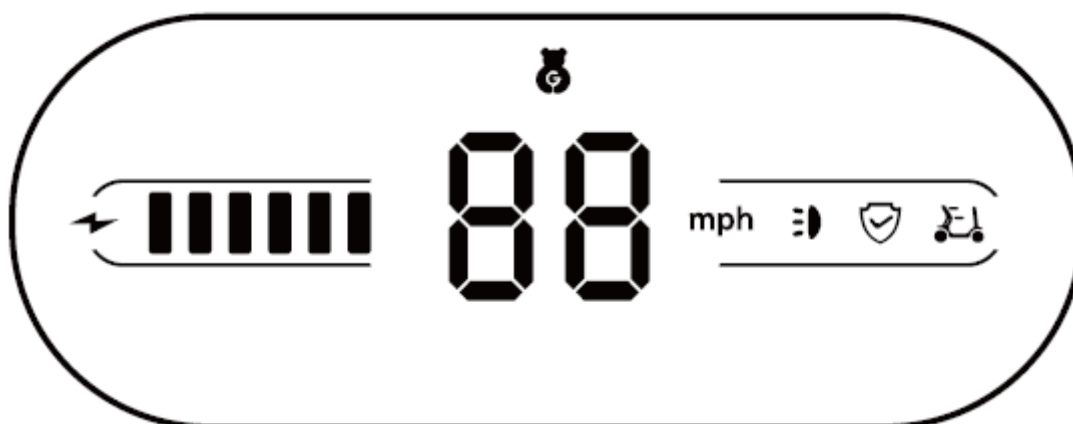

Varovanie: Elektromagnetickú brzdu uvoľňujte iba v nevyhnutných prípadoch, pretože jej zbytočné uvoľnenie môže byť nebezpečné.

INDIKÁTORY PALUBOVEJ DOSKY




Indikátor	Názov	Popis
	Stav vozíka	<p>Biela: Normálna jazda alebo používanie.</p> <p>Červená: Nie je možné ísť alebo používať.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bežné situácie, kedy sa môže objaviť červená: <ol style="list-style-type: none"> Nedosadnutie na sedadlo pri režime nastavenom na otočnom ovládači „Low-Medium-High“ (snímač na sedadle nie je aktívny, platí iba pre model S3). Nastavenie ovládača do režimu „Walk“ (chôdza) pri jazde na strmom svahu. Kontrolka sa rozsvieti červeno po naštartovaní vozíka a stlačení páčky plynu; pre normálne použitie je nutné páčku plynu uvoľniť a vozík reštartovať. Ak počas nastavovania nie je ovládač režimov v presnej polohe (zostane medzi polohami), rozsvieti sa červená kontrolka. Po nastavení do správnej polohy červená kontrolka zhasne.
	Bezpečnostný senzor	<p>Vypnuté: Bezpečnostný systém „PAI“ nie je aktivovaný.</p> <p>Biela: Bezpečnostný systém „PAI“ bol aktivovaný, aby detegoval stav vozovky a optimalizoval prevádzku vozíka pre lepší zážitok z jazdy.</p>
	Svetlá	<p>Vypnuté: Predné svetlo je vypnuté.</p> <p>Biela: Predné svetlo je zapnuté.</p>
	Aktuálna rýchlosť	Aktuálna rýchlosť vozíka.
	Indikátor batérie	Aktuálna zostávajúca úroveň nabitia batérie.
	Indikátor nabíjania	Svieti počas nabíjania.


NASTAVENIE HLASOVÉHO OZNÁMENIA

Predvolená hlasitosť oznámenia je nastavená na vysokú úroveň. Ak si prajete hlasitosť znížiť alebo ju úplne vypnúť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Postupným opakovaním týchto krokov môžete cyklicky meniť hlasitosť medzi úrovňami 100 %, 50 % a stlmením (*mute*).


1. **Našartujte vozík** otočením kľúča do polohy „on“. Vozík je teraz našartovaný.

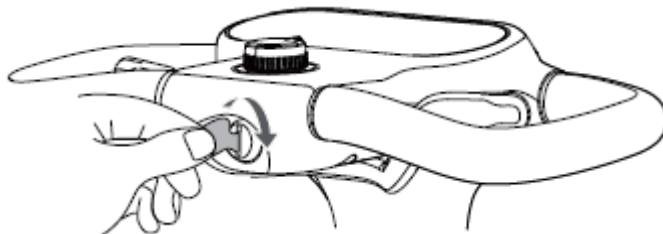


2. **Otočte ovládač režimov** do režimu „walk“ (chôdza).

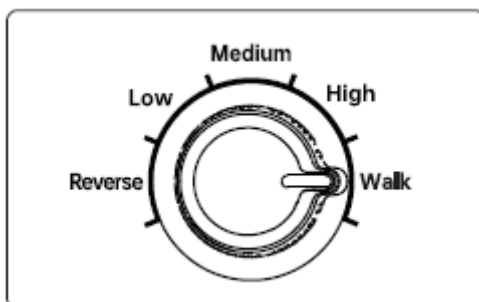

3. **Stlačte tlačidlo „Light“** (svetlo). V tejto chvíli sa rozsvieti predný svetlomet.

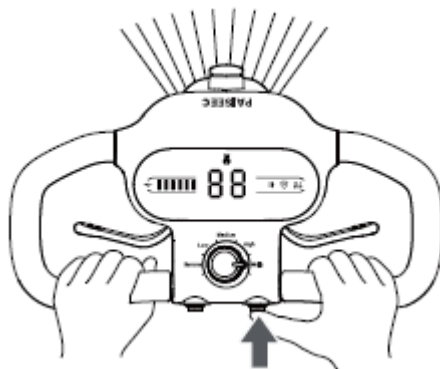

4. **Stlačte a podržte tlačidlo klaksónu („horn“)** po dobu 8 sekúnd, pokiaľ nebudete počuť hlasové oznámenie: „Volume adjusted to 50%. Please drive with caution.“ (Hlasitosť nastavená na 50 %, prosím, choďte opatrne).

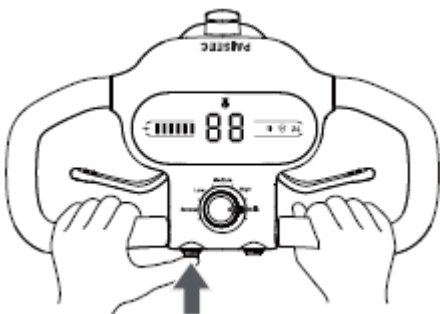

Po vykonaní týchto krokov bude hlasitosť nastavená na 50 %.

- **Ak chcete stlmiť hlasové výzvy z úrovne 50 %**, budete musieť celý tento postup zopakovať.

- **Vykonaním všetkých týchto krokov trikrát** sa hlasitosť vráti na východiskové nastavenie (100 % hlasitosť).

Týmito krokmi sa nezmení hlasitosť klaksónu, aby sa zabezpečilo, že klaksón bude počas jazdy trubiť vždy, keď to budete potrebovať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Chráňte proti vode a nadmernej vlhkosti, aby ste sa vyhli poškodeniu vnútorného elektrického obehu.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Nevystavujte extrémnym teplotným podmienkam.
- Chráňte proti ostrým predmetom a hranám.
- Chráňte proti nárazom.
- Produkt sami neopravujte. Vždy kontaktujte servisné oddelenie.

PRED JAZDOU

Pred jazdou skontrolujte nasledujúce:

- Funkčnosť brzd, svetiel, pohyb a vôľu kormidla a iné.
- Skontrolujte správny tlak v pneumatikách a ich stav.
- Nastavte správnu polohu sedadla.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.

BATÉRIA

Batérie s gélovým elektrolytom sú bez údržbové a sú všeobecne považované za stabilnejšie, bezpečnejšie a menej rizikové ako batérie Li-ion, čo zaisťuje bezpečnú prevádzku aj pri dlhodobom používaní. Batérie sú vysoko výkonné a majú nízke samočinné vybíjanie. Batériu odporúčame pravidelne dobíjať aj v prípade nepoužívania vozíka cca 1x za mesiac a skladovať ich nabité na 60 – 80 % kapacity.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu batérie, ktoré môže spôsobiť kratší dojazd alebo v horšom prípade úplnú nefunkčnosť. Pravidelným dobíjaním predlžujete životnosť batérie. Pred prvým použitím odporúčame vykonať plné nabitie batérie.

Upozornenie! Batérie nikdy nenechávajúte vybité! Batérie dobíjajte vždy tak dlho, pokiaľ na nabíjačke nesvieti indikácia ukončenia nabíjania.

Pre správnu funkčnosť a bezpečné použitie batérie sa riadte inštrukciami v manuáli. Ak je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápach prestaňte batériu ihneď používať.

- Životnosť batérie je limitovaná. Pokiaľ používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd vozíka.
- Batériu neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Do batérie nekladajte cudzie predmety.
- Ideálna teplota na nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Pokiaľ používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.

NABÍJANIE BATÉRIE

Inteligentná nabíjačka dodávaná k vozíku automaticky nabíjačku odpojí, pokiaľ je batéria nabitá na 100% - má ochranu proti prebitiu.

Nabíjačku počas nabíjania nikdy neprikrývajte, inak hrozí jej poškodenie.

Nabíjačka sa môže poškodiť vďaka abnormálnemu vystaveniu vode, nárazom a pod. V tomto prípade sa na ňu nevzťahuje záručná lehota. Nabíjajte vždy iba vypnutý vozík.



Batériu nikdy nenabíjajte inou nabíjačkou ako tou, ktorá patrí k vozíku. Inak je tu vážne riziko poškodenia či zničenia batérie.

Nenabíjajte vozík bez dozoru!

Postup pri nabíjaní

1. Odstráňte ochrannú krytku nabíjacieho konektora (zásuvky) a zasuňte do nej konektor (zástrčku) nabíjačky.
2. Pripojte nabíjačku do elektrickej siete (230 V).
3. Proces nabíjania je funkčný, ak LED svetlo na nabíjačke svieti červeno. Po nabití batérie sa LED svetlo rozsvieti zeleno.
4. Po nabití akumulátora odpojte nabíjačku z elektrickej siete a konektor nabíjačky (zástrčku) z konektora vozíka (zásuvky).
5. Starostlivo zatvorte nabíjací konektor na vozíku ochrannou krytkou.

Nabíjačka musí byť pripojená k zdroju AC220V \pm 20%, inak môže dôjsť k podbitiu batérie. Najprv pripojte batériu k invalidnému vozíku a potom do zásuvky.

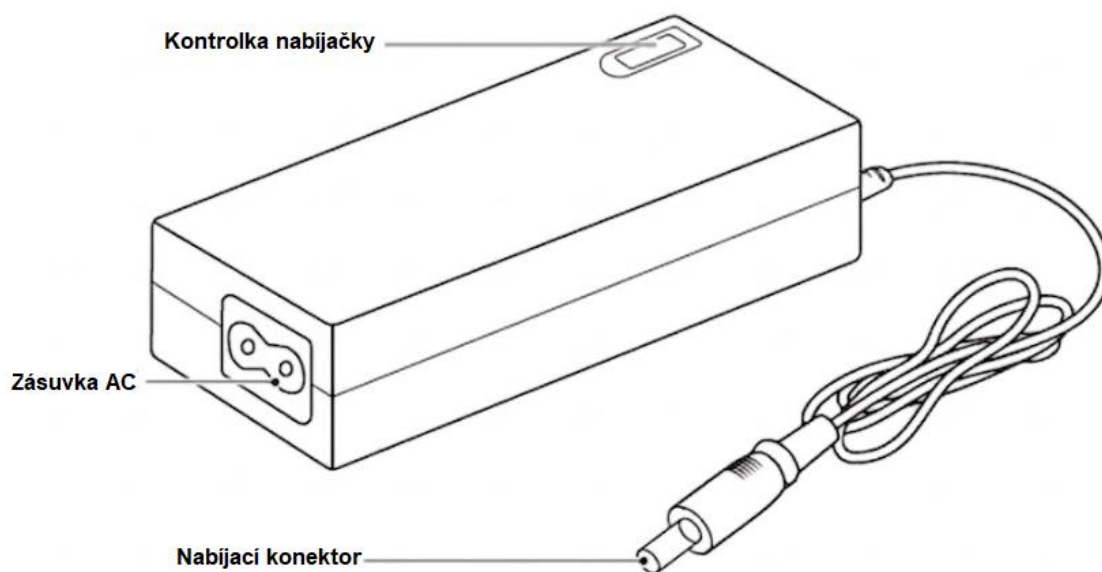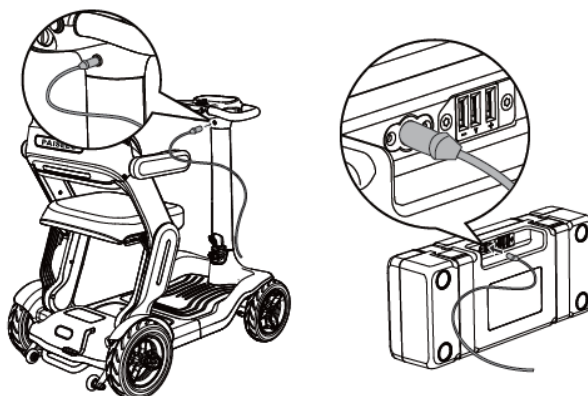

Indikátor nabíjania

Červená: Nabíjanie

Zelená: Plne nabité alebo pohotovostný režim

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Aby ste udržali optimálny výkon vozíka, znížili výskyt porúch a zaistili si bezpečný a pohodlný zážitok z jazdy pri každodennom používaní, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu:

1. Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny na obsluhu a pochopte význam každého bodu. Riadiaca jednotka vozíka je kritickou súčasťou. Nepokúšajte sa riadiacu jednotku otvárať, opravovať ani vykonávať činnosti, ktoré by ju upravovali. Povrch riadiacej jednotky pravidelne utierajte suchou a mäkkou handričkou, aby ste odstránili nečistoty. Je prísne zakázané používať riadiacu jednotku v prostredí s nadmernou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
2. Nepokúšajte sa otvárať, opravovať alebo manipulovať s vnútornou štruktúrou motora, pretože by to mohlo motor poškodiť a viesť k strate záruky. Dlhodobé preťažovanie alebo blokovanie motora je prísne zakázané. Mali by ste pravidelne čistiť povrch motora, najmä nečistoty na vývodných kábloch motora. Nevystavujte motor vode. Prechádzanie vody hlbšie ako 5 cm môže viesť k vniknutiu vody do motora, čo môže mať za následok jeho trvalé poškodenie.
3. Na čistenie krytu a ďalších častí vozíka nepoužívajte chemikálie ako je benzín. Namiesto toho použite na utieranie navlhčenú handričku. Navyše na vozíku vykonávajte pravidelné kontroly a údržbu.
4. Pravidelne kontrolujte, či nie je nutné dobíjanie, a pred jazdou skontrolujte brzdy, či nevykazujú známky poškodenia alebo opotrebovania. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie upevňovacích skrutiek páčky a uistite sa, že je páčka v neutrálnej polohe. Udržujte elektrický systém v suchu. Pravidelne hodnotite stav batérie a v prípade potreby utrite konektor batérie. Ak sa elektrický vozík dlhší čas nepoužíva, nabite ho raz mesačne. Pravidelne kontrolujte izoláciu vodičov a kvalitu zástrčkových spojov. Skontrolujte, či nedochádza k kývaniu predných a zadných pneumatík. V prípade akýchkoľvek abnormalít prosím navštívte predajcu, kde môžu profesionálni technici vykonať komplexnú prehliadku vozíka.

ŠPECIFIKÁCIE

Výkon vozíka	Max. rýchlosť	6 mph (10 km/h)
	Maximálny uhol stúpania	8°
	Maximálny uhol parkovania	15°
	Maximálna výška prekonania prekážky (schod)	2" (cca 5 cm)
	Maximálna výška prekonania prekážky (plynulá/bez schodu)	3" (cca 7,6 cm)
	Prevádzkové prostredie	-5 ~ 104 °F (-20 ~ 40 °C)
Špecifikácia batérie	Špecifikácia batérie	37V 12Ah lítiová batéria / 37V 8Ah lítiová batéria
	Špecifikácia nabíjačky	42V 1. 5A
	Vybratie batérie	Podporované
Špecifikácia vozíka	Rozložené rozmery (D x Š x V)	43 x 22 x 35" (109 x 55 x 88 cm) (vrátane košíka), 39 x 22 x 35" (99 x 55 x 88 cm) (bez košíka)
	Zložené rozmery (D x Š x V)	39 x 22 x 17" (99 x 55 x 43 cm) (bez košíka)
	Hmotnosť vozíka (vrátane batérie)	70 lb (32 kg)
	Predné kolesá	9-palcové pneumatiky
	Zadné kolesá	10-palcové pneumatiky
	Svetlá výška	2.76" (7 cm)
Špecifikácia sedadla	Veľkosť sedadla	16 x 14" (40 x 35 cm)
Elektronický systém	Systém pohonu	Bezpečnostný systém "PAi"
	Špecifikácia motora	250W bezkomutátorový motor
	Brzdový systém	Duálny brzdový systém: elektromagnetická brzda a elektronická brzda
	Spôsob odomykania	Mechanický kľúč
Úložný priestor	Háčik	Áno
	Košík	Áno
Špecifikácia nabíjačky	Vstupné napájacie napätie	100-240V, 50/ 60Hz
	Menovité výstupné napätie	42V
	Menovitý výstupný prúd	1.5A
	Prevádzková teplota	32 ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)
	Doba nabíjania	8 ~ 10 hodín

Zat'azenie elektrického vozíka	Zat'azenie	Stúpanie	Max. rýchlosť na rovine	Max. rýchlosť do kopca
	265 lb (120 kg)	8°	6 mph (10 km/h)	3 mph (6 km/h)
	220 lb (100 kg)	8°	6 mph (10 km/h)	5 mph (8 km/h)
	165 lb (75 kg)	8°	6 mph (10 km/h)	6 mph (10 km/h)

FAQ

Č.	Porucha	Príčina poruchy	Odstránenie poruchy (Riešenie)
1	Vozík nie je možné zapnúť po otočení kľúčikom.	<ol style="list-style-type: none"> Príliš nízke napätie batérie. Porucha spínača kľúča. 	<ol style="list-style-type: none"> Plne nabite batériu. Kontaktujte predajcu za účelom výmeny chybnéj súčiastky.
2	Páčka nereaguje. plynu	<ol style="list-style-type: none"> Príliš nízke napätie batérie. Spínač elektromagnetickej brzdy nie je zopnutý. Ovládač režimov nie je v správnej polohe. Snímač na sedadle je deaktivovaný. 	<ol style="list-style-type: none"> Plne nabite batériu. Vypnite spínač elektromagnetickej brzdy. Prepnite ovládač režimov do správnej polohy. Kontaktujte predajcu za účelom výmeny chybnéj súčiastky.
3	Nedostatočný dojazd po nabití.	<ol style="list-style-type: none"> Nedostatočné nabitie alebo porucha nabíjačky. Starnutie alebo poškodenie batérie. 	<ol style="list-style-type: none"> Dostatočne nabite batériu alebo vymeňte nabíjačku. Kontaktujte predajcu, aby skontroloval, či nie je batéria poškodená, a prípadne chybnú súčiastku vymenil.
4	Nabíjačka nenabíja.	<ol style="list-style-type: none"> Zásuvka nabíjačky je vypadnutá alebo konektor nie je pevne zasunutý. Porucha striedavého (AC) napájania. Porucha batérie. 	<ol style="list-style-type: none"> Upevnite zásuvku a konektor. Skontrolujte napájanie alebo upravte transformátor. Kontaktujte predajcu, aby skontroloval, či nie je batéria poškodená, a prípadne chybnú súčiastku vymenil.
5	Prerušenie napájania počas jazdy.	<ol style="list-style-type: none"> Aktivovaná ochrana riadiacej jednotky. Aktivovaná tepelná ochrana batériového boxu. 	<ol style="list-style-type: none"> Vypnite a znovu zapnite elektrický vozík. Pokračujte v jazde, akonáhle motor vychladne.
6	Ostatné poruchy.	<ol style="list-style-type: none"> Iné poruchy, ktoré nie sú uvedené v pokynoch vyššie. 	<ol style="list-style-type: none"> Kontaktujte dodávateľa alebo servisné stredisko. Sami elektrický vozík nerozoberajte.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte

vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

