

Masérské lehátko

Přenosný model




Gratulujeme, k nákupu vašeho nového přenosného masážního stolu. Váš nový masážní stůl, byl vytvořen pro náročné standardy, s využitím vysoce kvalitních komponentů a materiálů. Pokud budete o stůl řádně pečovat, jak je popsáno v této uživatelské příručce, váš stůl by měl poskytnout dlouholeté spolehlivé výkony. Prosím před tím, než začnete masážní stůl používat, přečtěte si návod k použití.

Preventivní pokyny

- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou bezpečně upevněné a lanka nejsou roztřepená.
- Ujistěte se, že neexistují žádné trhliny ve struktuře dřeva.
- Nezatěžujte stůl nad doporučený hmotnostní limit (250 kg). Mohlo by to způsobit vážné zranění člověka.
- Při údržbě povrchu masážního lehátka nepoužívejte přípravky s obsahem alkoholu (povrch lehátka tvoří ECO kůže – vinyl). Alkohol poškozuje vinylový materiál. Povrch lehátka umyjte pouze teplou vodou s mýdlem nebo speciálními přípravky k tomu určenými.
- Před použitím masážního stolu se ujistěte, že stojí v rovině a je stabilní.

Rozložení stolu

Stůl je velice jednoduchý na rozložení. Stačí jen položit kufřík z boku, po straně uvolnit spony částečně otevřít a vyjmout příslušenství. Pak pomalu začněte vytahovat skládací nožičky. Nakonec stůl postavte a nohy umístěte do rovné polohy.

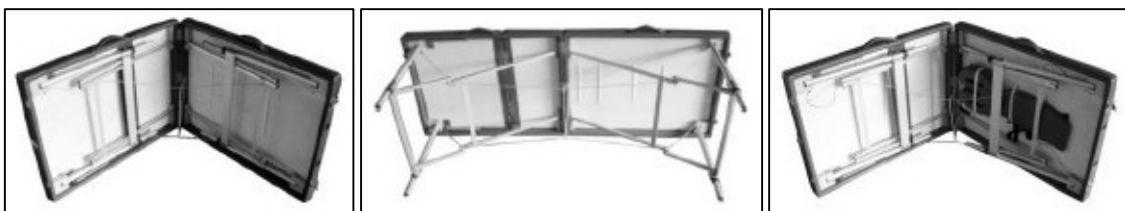


Použití doplňků ke stolu

Nabízíme Vám volitelné příslušenství. Prosím přečtěte si pozorně instrukce před použitím.



Opěradlo hlavy: Skládá se z plastového držáku a polstrování ve tvaru půlměsíce. Zajistí vašim klientům komfortní podpěru hlavy a obličeje. Nastavení opěradla je velice snadné, můžete měnit výšku i úhel. V čele stolu jsou dva otvory, do kterých zasunete opěradlo.

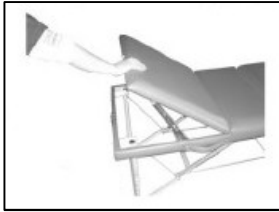

Nastavitelné opěradlo zad: Toto opěradlo se spíše využívá na kosmetické účely než na masáže. Opěradlo je velice jednoduché nastavit. Odemknete zámek a nastavíte opěradlo podle výšky, která vám vyhovuje. Vyzkoušejte, jestli opěradlo dobře drží. Pokud budete chtít dát opěradlo do původního stavu, musíte jej zvednout nahoru a pak opět pomalu dolů do původní polohy.



Přídavné opěradlo rukou: Užitečné zařízení v přední části stolu, sloužící k odložení rukou klienta. Pověste opěrku na dva plastové výstupky pod opěrkou hlavy a pohybem pásky nahoru nebo dolů zvolte optimální pozici. V závislosti na modelu může být i v jiném provedení.

Boční opěradla rukou: Po každém boku masážního stolu nalezneme dva otvory. Do těchto otvorů zasuneme opěrky rukou. Slouží nám k tomu, aby si klient mohl pohodlněji položit ruce.

Věšák na ručník: Skládá se ze tří částí. Všechny tři části spojíme a zasuneme do otvorů v čele místo opěradla hlavy.

Závěsná kapsa na masážní olejíčky: Závěsná kapsa má na sobě první část suchého zipu. Z vnější strany masážního stolu nalezneme druhý suchý zip. Zde přilepíme závěsnou kapsu.

Nastavení výšky

Výška u každého stolu se nastavuje podle výšky terapeuta. U vašeho masážního stolu se výška nastavuje tak, že u každé nožičky musíte posunout šroub nahoru nebo dolů na pozici, která vám vyhovuje.

Hmotnostní limit

Klient by si měl lehnout přímo doprostřed stolu. Tím bude zajištěna stabilita stolu a hmotnost se rozloží rovnoměrně po celé ploše stolu. Maximální doporučená hmotnost pro masérský stůl je 250 kg. Maximální povolená hmotnost osoby ležící na masérském lehátku je 150 kg.

Pracovní hmotnost terapeuta je kombinovaná s hmotností klienta. Například: Pokud klientova hmotnost bude 100 kg, tak by terapeutův nátlak neměl být vyšší než 130 kg.

POZOR: Nikdy nepřekračujte uvedenou maximální hmotnost. Mohlo by dojít k poškození stolu a k vážnému zranění klienta.

Složení masérského stolu

Složení masérského stolu je stejně jednoduché jako rozložení. Stačí jej položit na bok. Nohy složíme dovnitř. Okolo noh naskládáme příslušenství a složíme stůl. Pak jen zaklapneme zámky a vložíme do tašky.

Uskladnění stolu: Stůl skladujte v suchém prostředí. Nevystavujte přímému slunci ani na dešti. Nevystavujte ani otevřenému ohni.

Péče o masážní stůl

Pravidelné čištění: Po každém používání masážního stolu povrch umyjte teplou vodou s mýdlem a do sucha vysušte.

Dezinfekce: Masážní stůl dezinfikujte pouze přípravky určené na vinylový materiál.

Odstranění skvrn: Odstranění skvrn z vinylového materiálu je velice jednoduché. Stačí jen navlhčený hadr a mýdlo. Na odolné skvrny používejte přípravky k tomu určené.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte na čištění agresivní chemikálie. Mohou poškodit čalounění.

Péče o dřevo: Váš masážní stůl je vyroben z tvrdého dřeva. Povrch dřeva je nalakován lakem, který nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Masážní lehátko nenechávejte v mokru a vlhku. Na údržbu dřeva používejte jen speciální přípravky k tomu určené.